


HU: EASYBREATHE – HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

MI TALÁLHATÓ A CSOMAGBAN?

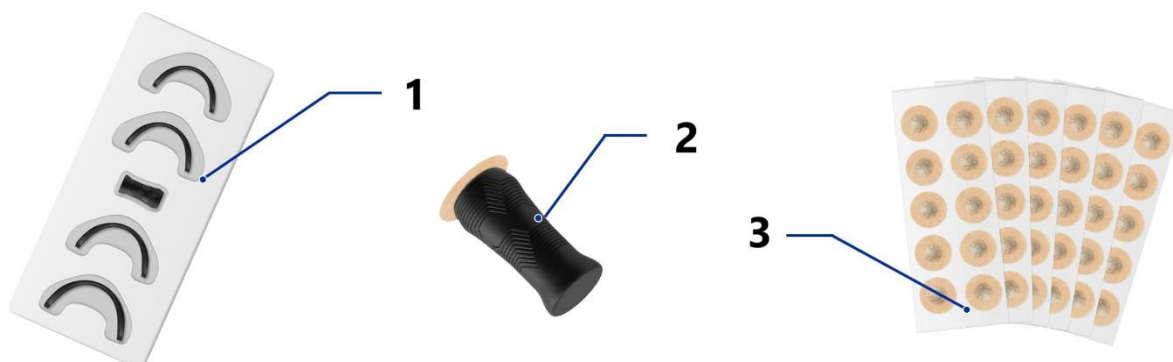

1. **4 ORRPÁNT:** Állítható orrcsipeszek különböző méretekben, hogy a legtöbb felhasználó számára megfelelőek legyenek.
2. **1 MÁGNESES ALKALMAZÓ:** Segít a mágneses orrpántok pontos elhelyezésében.
3. **15 MÁGNESES LAPKA:** Öntapadós lapkák, amelyek biztosítják az orrpántok stabil rögzítését.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ



1. **TISZTÍTÁS:** Mossa meg az orr környékét, hogy eltávolítsa a szennyeződéseket és a zsírt. Győződjön meg róla, hogy a bőr teljesen száraz, mielőtt a mágneses orrpántokat felhelyezi.
2. **FELHELYEZÉS:** Az alkalmazó segítségével helyezzen el egy mágneses lapkát az orra mindkét oldalán, közvetlenül az orrlyukak felett. Nyomja meg erősen a megfelelő tapadás érdekében.
3. **LAPKÁK ELHELYEZÉSE:** A fémlemezt kissé az orrlyukak fölé helyezze (nem közvetlenül rá), és ügyeljen arra, hogy a kialakított mélyedés megfelelően illeszkedjen.
4. **RÖGZÍTÉS:** Helyezze az EASYBREATHE pántot az orrára, hagyva, hogy a mágneses végek biztonságosan rögzüljenek a lapkához.