


LT: EASYBREATHE - NAUDOTOJO VADOVAS

KAS ĮEINA Į KOMPLEKTĄ?

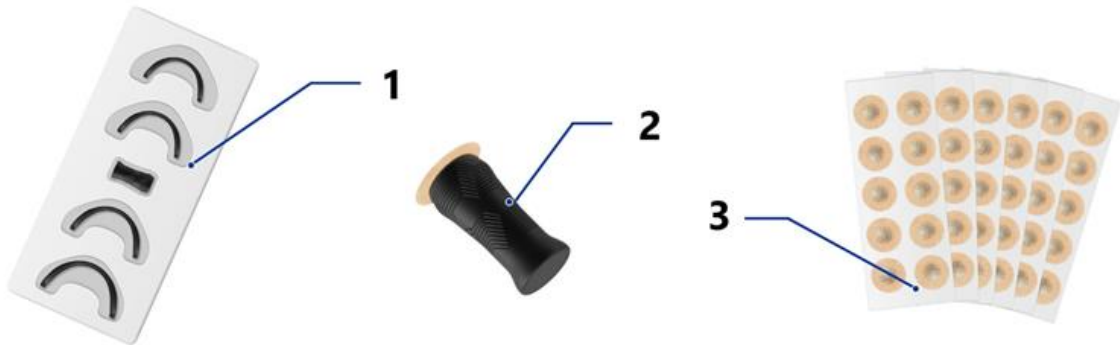

1. **4 nosies spaustukai:** Reguliuojami įvairių dydžių nosies spaustukai, kad tiktų daugumai naudotojų.
2. **1 MAGNETINIS APLIKATORIUS:** padeda kiekvieną nosies juostelę pritvirtinti tiksliai ten, kur reikia.
3. **15 MAGNETINIŲ JUOSTELIŲ:** Lipniu pagrindu pritvirtinti skirtukai, skirti saugiai pritvirtinti nosies juosteles.

NAUDOJIMO INSTRUKCIJOS



1. **VALYMAS:** nuplaukite nosies sritį, kad pašalintumėte nešvarumus ir riebalus. Prieš uždėdami magnetines nosies juosteles įsitikinkite, kad oda visiškai sausa.
2. **UŽDĖTI:** Naudodamiesi aplikatoriumi, uždėkite po magnetinę juostelę ant abiejų nosies pusių, šiek tiek aukščiau šnervių. Stipriai paspauskite, kad visiškai priliptų.
3. **UŽDĖTIS:** Plieninį diską uždėkite šiek tiek virš kiekvienos šnervės (ne tiesiai ant jos), įsitikinkite, kad kontūro įdubimas yra tinkamai išlygintas.
4. **PRITVIRTINIMAS:** uždėkite EASYBREATHE juostelę ant nosies, kad magnetiniai galai tvirtai užsifiksuotų ant skirtukų.