


GR: EASYBREATHE - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ;

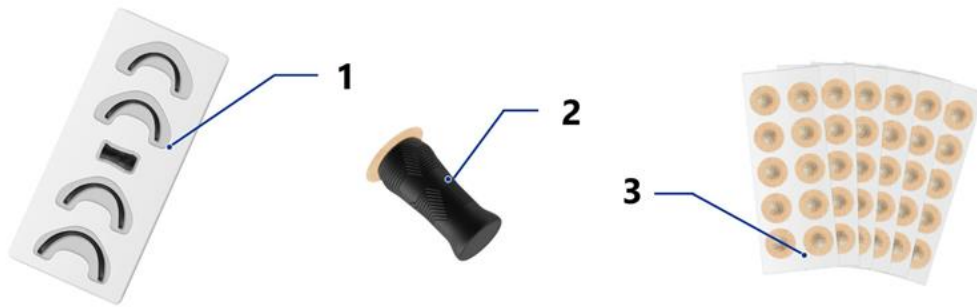

1. **4 ΚΛΕΙΔΙΑ ΜΥΤΗΣ:** Ρυθμιζόμενα κλιπ μύτης σε διάφορα μεγέθη για να εξυπηρετούν τους περισσότερους χρήστες.
2. **1 ΜΑΓΝΗΤΙΚΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΑΣ:** Βοηθάει να στερεωθεί κάθε ταινία μύτης ακριβώς στο σημείο που χρειάζεται.
3. **15 ΜΑΓΝΗΤΙΚΕΣ ΤΑΙΝΙΕΣ:** Καρτέλες με αυτοκόλλητη υποστήριξη, σχεδιασμένες για την ασφαλή στερέωση των ταινιών μύτης.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ



1. **ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ:** Πλύνετε την περιοχή της μύτης σας για να απομακρύνετε τη βρωμιά και το λάδι. Βεβαιωθείτε ότι το δέρμα σας είναι εντελώς στεγνό πριν εφαρμόσετε τις μαγνητικές ταινίες μύτης.
2. **ΕΦΑΡΜΟΣΤΕ:** Χρησιμοποιώντας τον εφαρμοστή, τοποθετήστε μια μαγνητική καρτέλα σε κάθε πλευρά της μύτης σας, ακριβώς πάνω από τα ρουθούνια. Πιέστε σταθερά για πλήρη πρόσφυση.
3. **ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΑΜΠ:** Τοποθετήστε τον ατσάλινο δίσκο ελαφρώς πάνω από κάθε ρουθούνι (όχι απευθείας πάνω του), εξασφαλίζοντας ότι η ανάγλυφη εσοχή ευθυγραμμίζεται σωστά.
4. **ΣΥΝΔΕΣΗ:** Τοποθετήστε τη ζώνη EASYBREATHE πάνω από τη μύτη σας, επιτρέποντας στα μαγνητικά άκρα να κουμπώσουν με ασφάλεια πάνω στις καρτέλες.