

DK: FIXEDFEET – BRUGERVEJLEDNING

Tak for dit køb af vores produkt. Med denne ikke-invasive, ikke-kirurgiske enhed kan du lindre smerter i storetåens led.



PAKKENS INDHOLD

1 par tåkorrektorer

PRODUKTSPECIFIKATIONER:

Materiale: nylon, polyurethan

Størrelse: S (36–38) / M (39–42)

ADVARSLER

- Brug ikke produktet på anden måde end beskrevet i brugsanvisningen, da det kan medføre skader eller personskade.
- Hvis produktet forårsager hudirritation, skal du stoppe med at bruge det med det samme og kontakte en læge.
- Vær forsigtig med, at remmen ikke hæfter sig fast i andet tøj, da det kan forårsage skade.

FORMÅL OG ANDRE OPLYSNINGER

Gelinlæg beskytter huden under gang og træning og fungerer som en pude for at beskytte det følsomme område omkring den skæve tå og forhindre smertefuld gnidning.

Korrektoren kan bæres diskret under sko, sokker og strømpebukser som usynlig beskyttelse. Den kan bruges med alle typer sko, herunder dit mest elegante par. Produktet er beregnet til at blive båret direkte på huden.

BRUGSANVISNING:



1. Før de andre tæer gennem den anden store åbning.
2. Sørg for at indsætte storetåen i den korrekte del af korrektoren (den lille sektion med åbningen). Placer den, så bagsiden af foden passer ind i den store åbning.

PLEJEINSTRUKTIONER

Vaskeanvisning

- Håndvask under 30 grader.
- Brug ikke blegemiddel. Brug et neutralt vaskemiddel uden blegemidler.
- Tør produktet et godt ventileret sted væk fra direkte sollys, dvs. i skygge eller indendørs. Må ikke tørretumbles.
- Brug ikke strygejern.
- Ikke egnet til rensning.

Vedligeholdelsesinstruktioner

Udsæt ikke produktet for direkte sollys, høje temperaturer eller andre forhold, der kan beskadige produktet. Opbevares tørt og godt ventileret.