

EE: HEATFOOT – KASUTUSJUHE

TEHNILISED ANDMED

Toote funktsioon: Juhtmevaba soojendav hüppeliigese side

Toote mudel: CL-2888

Aku mahtuvus: 2000 mAh

Nimivõimsus: 7,5 W

Nimipinge: 3,7 V

TÖÖKESKKOND

Parameeter	Töökeskkond	Hoiustamine ja transport
Temperatuurivahemik	0 °C ~ 40 °C	-0 °C ~ 50 °C
Niiskus	< 80 % RH	< 80 % RH
Õhurõhk	70 kPa – 106 kPa	70 kPa – 106 kPa

KASUTUSJUHISED



1



2



3



3



4



5

1. Enne kasutamist veenduge, et toodet saab sisse lülitada. Kui ei saa, laadige see komplektis oleva laadimiskaabliga.
2. Asetage elektriline soojendav side hüppeliigesele.
3. Vajutage ja hoidke toitenuppu 2 sekundit; kontrolleri annab kaks helisignaali ning määratud temperatuuriks on 50 °C.

4. Kasutamise ajal vajutage üks kord soojendusnuppu, et tõsta temperatuuri kuni 60 °C. Vajutage uuesti, et soojendus välja lülitada. Soojendusrežiim töötab tsükliliselt temperatuuridel 40 °C → 45 °C → 50 °C → 55 °C → 60 °C.
5. Kasutamise ajal vajutage vibratsiooninuppu üks kord, et sisse lülitada 1. tase, vajutage uuesti, et sisse lülitada 3. tase, ja veel kord, et vibratsioon välja lülitada. Vibratsioonirežiim töötab tsükliliselt.
6. Toote väljalülitamiseks vajutage ja hoidke toitenuppu 2 sekundit, kuni kontrollerr annab helisignaali. Toode lülitub välja ja kõik indikaatorid kustuvad.

JUHISED RINGLUSSEVÕTU JA KÕRVALDAMISE KOHTA:



See märgis tähendab, et toodet ei tohi kogu ELis kõrvaldada muude olmejäätmetena. Et vältida võimalikku kahju keskkonnale või inimeste tervisele kontrollimatust jäätmete kõrvaldamisest. Taaskasutage vastutustundlikult, et edendada materiaalse ressursside säästvat kasutamist. Kui soovite kasutatud seadme tagastada, kasutage ära viimis- ja kogumissüsteemi või võtke ühendust jaemüüjaga, kellelt te toote ostsite. Jaemüüja võib toote vastu võtta keskkonnasõbralikuks ringlussevõtuks.



Tootja deklaratsioon selle kohta, et toode vastab kohaldatavate ELi direktiivide nõuetele.