

LT: HEATFOOT – NAUDOJIMO INSTRUKCIJA

TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS

Produkto funkcija: Belaidis šildantis čiurnos įtvaras

Produkto modelis: CL-2888

Baterijos talpa: 2000 mAh

Nominali galia: 7,5 W

Nominali įtampa: 3,7 V

DARBO APLINKA

Parametras	Darbo aplinka	Laikymas ir transportavimas
Temperatūros diapazonas	0 °C ~ 40 °C	-0 °C ~ 50 °C
Drėgmė	< 80 % RH	< 80 % RH
Atmosferos slėgis	70 kPa – 106 kPa	70 kPa – 106 kPa

NAUDOJIMO INSTRUKCIJA



1



2



3



3



4



5

1. Prieš naudodami įsitikinkite, kad gaminį galima įjungti. Jei ne, įkraukite jį naudodami komplekte esantį įkrovimo laidą.
2. Uždėkite elektrinį šildantį įtvarą ant čiurnos.
3. Paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką 2 sekundes; valdiklis du kartus supypsės, o nustatyta temperatūra bus 50 °C.

4. Naudojimo metu vieną kartą paspauskite šildymo mygtuką, kad padidintumėte temperatūrą iki 60 °C. Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte šildymą. Šildymo režimas veikia cikliška šiomis temperatūromis: 40 °C → 45 °C → 50 °C → 55 °C → 60 °C.
5. Naudojimo metu paspauskite vibracijos mygtuką vieną kartą, kad įjungtumėte 1 lygį, paspauskite dar kartą, kad įjungtumėte 3 lygį, ir dar kartą – kad išjungtumėte vibraciją. Vibracijos režimas veikia cikliška.
6. Norėdami išjungti gaminį, paspauskite ir laikykite maitinimo mygtuką 2 sekundes, kol valdiklis supypsės. Gaminys išsijungs, o visi indikatoriai užges.

INSTRUKCIJOS DĖL PERDIRBIMO IR IŠMETIMO:



Ši žymė reiškia, kad produktas negali būti išmestas kaip įprastos namų ūkio atliekos visoje ES. Norint išvengti galimų žalos aplinkai ar žmonių sveikatai dėl nekontroliuojamo atliekų šalinimo. Perdirbkite atsakingai skatinant tvarų medžiagų išteklių naudojimą. Norėdami grąžinti naudotą įrenginį, naudokite atidavimo ir rinkimo sistemą arba susisiekite su pardavėju, iš kurio įsigijote produktą. Pardavėjas gali priimti produktą aplinkai saugiam perdirbimui.



Gamintojo deklaracija, kad produktas atitinka taikomus ES direktyvų reikalavimus.