

IT: NECKSHA - MANUALE D'USO

Parametri del dispositivo

Tensione di carica: 5 V

Potenza nominale: 0,6W

Tensione di lavoro: 3,7V

Corrente di lavoro: 0,12A


Applicazione del prodotto



1. Questo prodotto viene appeso al collo, il collare si adatta al corpo e l'estremità anteriore si trova sotto la clavicola.
2. Assicurarsi che l'host del sensore sia verticale e vicino al corpo.
3. Questo prodotto deve essere attaccato alla pelle e indossato all'interno dei vestiti, altrimenti potrebbe essere impreciso e facile da far cadere.

Monitoraggio delle impostazioni dei promemoria

1. Avvio e spegnimento
2. Tasto di accensione/spegnimento Accensione: premere e tenere premuto per 2 secondi.
3. Spegnimento: tenere premuto per 2 secondi.
4. Metodo di impostazione
5. Regolare l'angolo di correzione appropriato, premere a lungo il tasto di accensione per 2 secondi; lo strumento visualizza due "83" e lampeggia 3 volte, quindi visualizza " ", a indicare che il prodotto inizia a funzionare normalmente.
6. Promemoria di monitoraggio in caso di abbassamento o piegamento della schiena, l'utente vibra continuamente quando la posizione seduta supera i 25 gradi fino a quando non viene corretta. Ogni promemoria di vibrazione verrà registrato e non vibrerà quando tornerà a 5-0 gradi.

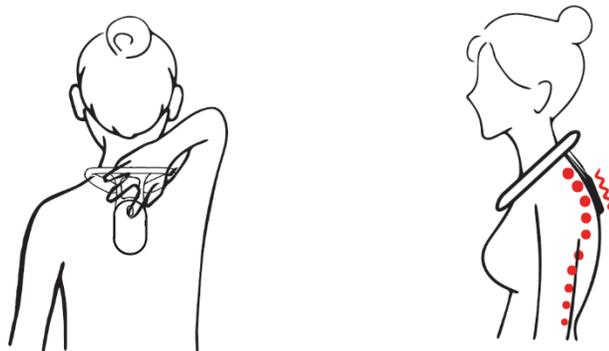


Descrizione del promemoria e dell'indicatore

Stato funzionale	Funzionamento dei tasti	Descrizione del promemoria	Istruzioni per lo schermo
Accensione	Tenere premuto per 2 secondi	Sullo schermo appare " "	" " Lampeggia 3 volte
Spegnimento	Tenere premuto per 2 secondi	*	La luce si spegne
Registrare la posa di riferimento	*	Invia un promemoria con vibrazione	
Promemoria dei gesti	*	Continua a vibrare finché il raddrizzatore di postura non viene raddrizzato	Tempi di correzione + 1
Ricarica	*	*	Durante la ricarica, sullo schermo viene visualizzato " " Flash, flash, piena luce lunga.

Promemoria:


1. Si consiglia di caricare completamente l'host prima di utilizzarlo per la prima volta.
2. Dopo un uso prolungato, se la vibrazione è debole, si consiglia di ricaricarlo per tempo.
3. Questo prodotto è consigliato ai bambini di età superiore ai 4 anni, agli adolescenti e agli adulti.
4. Questo prodotto deve essere attaccato alla pelle e indossato all'interno dei vestiti per evitare richiami imprecisi, cadute e altre situazioni.
5. La correzione in sé non è una cosa facile. Richiede iniziativa, impegno e perseveranza per ottenere risultati.

Istruzioni per la ricarica

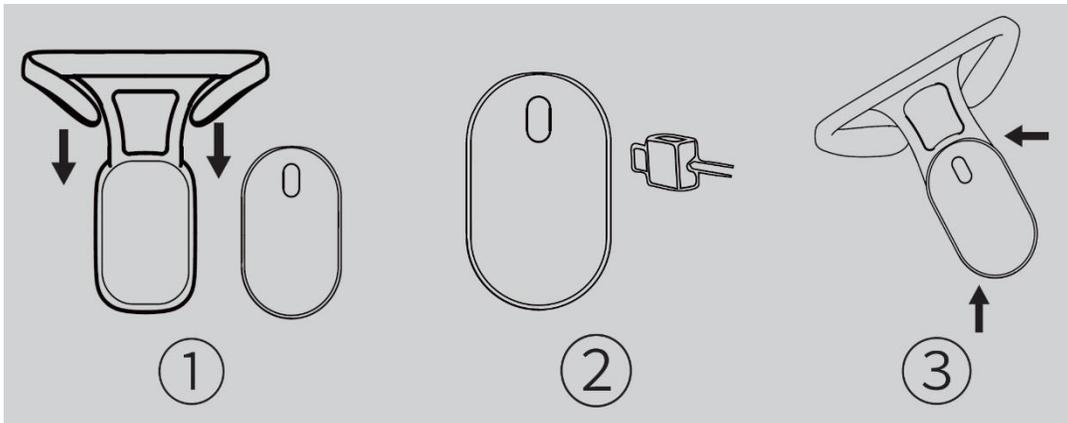

1. Prima di procedere alla ricarica, è necessario rimuovere l'host del sensore, afferrare il collo in silicone e tirarlo delicatamente verso il basso, per far uscire l'host.
2. Utilizzare il cavo di ricarica micro-USB standard di supporto per collegare l'host del sensore per la ricarica.
3. Dopo la ricarica completa, installare nuovamente l'host del sensore nel collare, inclinare e allineare la barra quadrata del limite inferiore e premerla verso il basso, quindi agganciare la barra quadrata del limite superiore nella posizione corrispondente del sensore.

Trattamento delle batterie di scarto

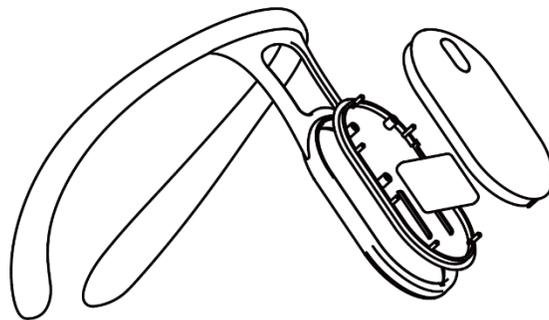

1. Quando l'apparecchio raggiunge la sua durata di vita, potrebbe essere necessario rimuovere la batteria interna in base alle leggi e alle normative del paese o della regione in cui si trova. Se non è possibile rimuovere la batteria, consegnare il prodotto al centro di riciclaggio designato dal governo.
2. A meno che non debba essere smaltito, non smontare il prodotto da soli. Lo smontaggio prematuro può danneggiare il prodotto; durante il funzionamento è necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base. L'alimentazione deve essere scollegata prima di rimuovere la batteria.
3. Prima di smontare la batteria, accertarsi che la batteria sia esaurita; Se è necessario esaurire l'alimentazione, è possibile accenderla finché non si spegne automaticamente.
4. Per il corretto riciclaggio o smaltimento delle batterie, chiedere al centro di riciclaggio designato dal governo locale se è possibile riciclare altre parti dell'ortesi.

5. Fare attenzione a non cortocircuitare i poli positivo e negativo della batteria. Dopo aver tolto la batteria, il prodotto non deve essere riacceso.

Pulizia e stoccaggio

1. Pulizia e conservazione La parte host del sensore di questo prodotto non è impermeabile. Non sciacquare con acqua. Se è necessario pulirlo, si prega di strofinarlo con un panno asciutto o un panno bagnato e strizzato.
2. Il collare può essere lavato separatamente o pulito con un panno umido. Dopo la pulizia, asciugare in un luogo fresco per evitare il sole.
3. Dopo aver utilizzato sostanze volatili come l'alcol per la pulizia e la disinfezione, riporre il collare in un luogo fresco e ventilato e attendere che le sostanze si volatilizzino completamente.
4. Condizioni di stoccaggio: temperatura: -10 °C + 55 °C, umidità relativa: 10% -80% U.R. senza condensa.
5. Se il prodotto non viene utilizzato per lungo tempo, caricare regolarmente l'host del sensore per evitare danni.
6. Conservare il prodotto in un ambiente ben ventilato e privo di gas corrosivi, evitare la luce solare diretta e tenerlo lontano da apparecchi di riscaldamento e fiamme libere.

ISTRUZIONI PER IL RICICLAGGIO E LO SMALTIMENTO:



Questa etichetta indica che il prodotto non può essere smaltito come altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per evitare potenziali danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti. Riciclare responsabilmente per promuovere l'uso sostenibile delle risorse materiali. Se si desidera restituire un dispositivo usato, utilizzare il sistema di raccolta e riconsegna o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Il rivenditore può accettare il prodotto per un riciclaggio sicuro dal punto di vista ambientale.



Una dichiarazione del produttore che attesti la conformità del prodotto ai requisiti delle direttive UE applicabili.