

ASPIRADOR NASAL ELÉTRICO NASALEX

Equipamento de inalação para crianças



MANUAL DO UTILIZADOR

Prezado cliente,

Obrigado por comprar o nosso excelente produto — aspirador nasal elétrico para crianças Nasalex. Desentope suavemente o nariz entupido do seu bebé. Alivia a falta de ar, melhora o bem-estar e ajuda a curar a constipação do seu bebé. Poder de sucção ajustável e carregamento USB.

Leia atentamente as instruções a seguir antes de começar a utilizar este aspirador nasal elétrico.

CARACTERÍSTICAS:

- Cinco engrenagens podem ser ajustadas e selecionadas por um controlo chave, fácil e conveniente para suprir diferentes necessidades
- Cabeça de sucção e bico de silicone de qualidade alimentar, macios e gentis para a pele
- Design destacável para limpeza conveniente
- Design ergonómico com radiado humanizado, confortável de segurar
- Design recarregável com cabo USB, fácil de carregar e de utilização duradoura
- Design anti-refluxo, pode evitar que o muco flua de volta para o nariz

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- 1 x Aspirador Nasal (unidade principal)
- 2 x Bico de Sucção
- 1 x Pacote de Esponjas,
- 1 x Cabo USB



INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Tensão do motor: 3V

Sucção máxima de vácuo: 350 mmHg (60 kPa)

Condições de armazenamento: -10 - 55°C (a humidade relativa permanece dentro de 85%)

Condições de funcionamento: 16 - 35 °C (a humidade relativa permanece dentro de 85%)

Comprimento do cabo USB: cerca de 77 cm

Material: Silicone

Idade adequada: 0 - 6 anos

2 tamanhos de pontas de nariz :

Ponta de Cabaça: Adequada para recém-

Ponta de funil: 2 anos ou mais



nascidos

PRECAUÇÕES

O incumprimento destes avisos e das instruções de montagem pode causar ferimentos graves ou morte.

- Este produto não é um brinquedo
- Este produto foi concebido para remover o excesso de muco nasal. Não o utilize para qualquer outro propósito.
- Antes da utilização, certifique-se de que o bico de plástico de silicone está firmemente montado na extremidade de entrada.
- O produto deve ser restrito à utilização pessoal. Não partilhe o produto com outros, pois isso pode ajudar a espalhar doenças infecciosas.
- O Produto é concebido apenas para utilização doméstica. Não deve ser aplicado a qualquer finalidade comercial ou médica.

- Limpe o estojo para secar antes de abrir a tampa.
- Não lave e limpe o produto com diluente, benzeno ou qualquer solvente.
- Pare de utilizar o produto se estiver danificado ou deformado por um golpe grave ou devolvê-lo ao vendedor se o produto estiver com defeito.
- O produto é concebido apenas para utilização por um adulto competente; qualquer utilização por parte da própria criança é estritamente inibida.
- Não utilize o produto para qualquer finalidade que não seja sugar o muco em excesso das crianças.
- É estritamente proibido colocar o bico na narina do bebé por um longo período de tempo; alguns segundos serão suficientes para remover o muco.
- Não enfie o bico na narina; um toque com o lado externo da narina será suficiente para que a máquina funcione bem.
- Não utilize o produto se houver qualquer ferida, ou sintoma de inflamação ou sangramento no nariz ou tratamento pós-otorrinolarinolológico.
- Certifique-se de que limpa o produto antes e depois da utilização, consultando a secção de limpeza.
- Armazene o produto em local seco e fresco.
- Mantenha o aspirador nasal longe de fontes de calor, como lareiras, radiadores, fogões e outros aparelhos. O calor pode danificar a caixa ou peças elétricas.
- O produto não deve ser utilizado para fins médicos. Se houver algum problema relacionado com a saúde, pare de utilizar o produto imediatamente e consulte um médico qualificado.

NOMES DE PEÇAS



1. BICO
2. INVÓLUCRO
3. RANHURA DE ARMAZENAMENTO DE MACACOS
4. SUCÇÃO DO CORPO

INSTRUÇÕES DE MONTAGEM



Peças a serem instaladas.
armazenamento



Instalar a tampa da ranhura de



Instale o escudo e rode-o da direita para a esquerda, finalmente instale a ponta/bico



Se quiser desmontar o aparelho, siga as etapas de trás para frente.

Certifique-se sempre de que a esponja de filtro está inserida sob a ranhura de armazenamento. Quando a esponja de filtro estiver suja, precisa ser substituída, substitua-a e instale-a conforme descrito acima.

ANTES DA UTILIZAÇÃO:

1. Antes da utilização, mergulhe o bico de sucção em água salgada morna por 10 minutos para desinfetar e, de seguida, instale o inspirador nasal de acordo com as instruções. Ligue o interruptor e comece com a sucção do excremento nasal da parede nasal.
2. **O que fazer com o muco seco?** Utilize a solução salina ou o spray nasal que compra. Pulverize as narinas e após quatro a cinco minutos utilize o aspirador.
3. **Carregar o produto:**



Quando carregar o produto, ligue o cabo USB ao carregador (não incluído) ou ao computador. A luz vermelha estará acesa ao carregar; a luz verde estará acesa quando terminar.

4. **ATENÇÃO:** LEMBRE-SE DE NÃO USAR FORÇA BRUTA PARA ASPIRAR O NARIZ SECO DO BEBÊ!

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO:

1. Instale o aspirador nasal de acordo com as instruções acima e pressione o interruptor de energia para iniciar.

Ajuste o nível de sucção:



Pressione o botão de ligar/desligar para iniciar o dispositivo num nível baixo 1.

Pressione o botão de ligar/desligar duas vezes para iniciar num nível baixo 2.

Pressione o botão de ligar/desligar três vezes para iniciar num nível médio 3.


Pressione o botão de ligar/desligar quatro vezes para iniciar num nível elevado 4.

Pressione o botão de ligar/desligar cinco vezes para iniciar num nível elevado 5.

Pressione o botão de ligar/desligar seis vezes para desligar o dispositivo.

2. Se o excremento nasal estiver seco, pode utilizar spray salino ou nasal para pulverizar a narina primeiro. Cerca de 1-2 min antes da aspiração, pulverizar a solução salina na narina da criança para soltar o muco e auxiliar a aspiração.

3. Segure o bebé na posição vertical e insira a ponta no nariz do bebé. Tenha cuidado para não colocar a ponta muito longe na narina ou pressionar contra a parede interna da narina. Certifique-se de que mantém a ponta do aspirador num ângulo de 90°. Não aponte para a narina. Deixe o aspirador funcionar durante cerca de 3-5 seg., e observe o muco a fluir para a câmara coletora. Repita na outra narina e conforme necessário.

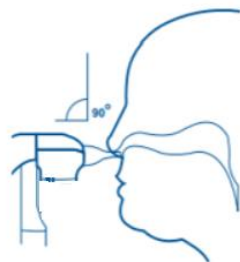

OBTENHA OS MELHORES RESULTADOS: enquanto estiver a utilizar o aspirador numa narina, tape suavemente a outra narina com o dedo (por 1-2 segundos), isso tornará a aspiração melhor e mais fácil.

4. Limpe as peças componentes.

ATENÇÃO: NUNCA insira o aspirador muito longe na narina. Nunca coloque a ponta firmemente contra a parede interna da narina. Nunca utilize nas orelhas, na boca ou nos olhos. Este aspirador é para limpar congestionamento nas vias nasais. Não utilize o dispositivo para outra coisa que não seja a finalidade pretendida.

NOTA:

- Consulte o seu médico sobre quando e com que frequência deve aspirar as vias nasais do seu bebé.
- Quando vir que o copo de recolha está a ficar cheio, pare o dispositivo e limpe-o.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO

Após cada utilização, limpe o bico de sucção e outras peças laváveis.

Primeiro, desmonte todas as peças de remoção. Separe a parte de sucção do aspirador da base colocando o polegar sob a ponta e retirando-a do aspirador. Pegue no invólucro e puxe-o para longe também (se for difícil, rodá-lo um pouco da direita para a esquerda). Agora, remova também a ranhura de armazenamento de macacos rodando-o da esquerda para a direita.

Limpe o copo de recolha, invólucro e bico completamente com água. Esterilize com água a ferver ou vapor.



Nota:

O corpo não é lavável, não coloque o corpo dentro de água para limpar. Não tente limpar a unidade principal lavando-a com água, pois não é resistente à água. Para limpar a unidade principal, limpe-a com um pano macio e húmido.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

Problema	Possível causa	Solução
O aparelho não funciona.	A cabeça de sucção não está instalada corretamente	Verifique a cabeça de sucção e verifique se está instalada corretamente (siga as instruções).
	O copo de armazenamento está muito cheio ou sujo	Limpe o dispositivo como mencionado na secção de “limpeza”.
	O dispositivo pode estar vazio.	Carregue o dispositivo.
A sucção é fraca ou não há sucção.	O dispositivo está vazio	Carregue o dispositivo
	O copo de armazenamento está muito cheio ou sujo	Limpe o dispositivo como mencionado na secção de “limpeza”.
Uma descarga nasal invisível na cavidade nasal	o bico de sucção não toca no nariz, precisa de aspirar o princípio do vácuo para cheirar	deixe o bebê ficar ou deitar-se ao meio, cabeça para cima (se o nariz estiver seco, use spray salino ou nasal para humedecer a cavidade nasal primeiro).



Instruções de reciclagem e eliminação



Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar eventuais danos ao ambiente ou à saúde humana resultantes da eliminação descontrolada de resíduos; recicle-os de forma responsável para promover a reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo utilizado, utilize os sistemas de devolução e recolha ou entre em contacto com o retalhista onde o produto foi comprado. Este pode levar este produto para reciclagem segura em termos ambientais



Declaração do fabricante de que o produto cumpre os requisitos das diretivas comunitárias aplicáveis.