

FIXEDFEET

Korektor vbočeného palce



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

Zbavte se bolesti kloubu palce díky tomuto neinvazivnímu a neoperativnímu řešení.

OBSAH BALENÍ:

1 pár korektorů vbočeného palce

SPECIFIKACE PRODUKTU:

Materiál: nylon, polyuretan

Velikost: S (36-38) / M (39-42)

VAROVÁNÍ

- Nepoužívejte tento výrobek jinak, než je uvedeno v tomto návodu, protože by to mohlo vést k poškození nebo zranění.
- V případě, že produkt způsobí podráždění kůže, přestaňte jej okamžitě nosit a poraďte se s lékařem.
- Ujistěte se, že zapínání není přichyceno k jinému oblečení, protože by to mohlo oblečení poškodit.

POKYNY:

Gel lékařské kvality chrání pokožku při chůzi a cvičení. Gelová podložka působí jako nárazník, který chrání citlivou oblast vbočeného palce, aby se zabránilo bolestivému tření.

ÚČEL POUŽITÍ A VLASTNOSTI: Tento chránič vbočeného palce lze nenápadně nosit v botách, ponožkách a punčochách, aniž by si toho někdo všiml. Lze je nosit ve všech druzích obuvi včetně vašeho nejelegantnějšího páru.

Tento výrobek je určen k nošení přímo na kůži.



1

Rozevřete produkt a protáhněte špičky prstů otvorem.



2

Palec vložte do části s malým otvorem ve špičce.

Zatáhněte tak, aby zadní část chodidla zapadala do velkého otvoru.

POKYNY PRO PÉČI

Pokyny pro praní

- Ruční praní pod 30 stupňů.
- Nebělit. Použijte neutrální čisticí prostředek, který neobsahuje bělicí přísady.
- Produkt sušte na místě s dobrou ventilací mimo dosah přímého slunečního světla, tedy ve stínu nebo uvnitř místnosti. Nesušit v sušičce.
- Nežehlit.
- Nečistit chemicky.

Pokyny pro skladování

Nevystavujte výrobek přímému slunečnímu záření, vysokým teplotám nebo jiným podmínkám, které by mohly způsobit poškození. Skladujte na suchém místě s dobrým větráním.

Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s domácím směsným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použitý produkt, využijte možnosti vrácení a sběru nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.