

HALLUX

Corector din silicon pentru monturi



MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim pentru că ați cumpărat produsul nostru.

Acesta reprezintă o inovație absolut necesară pentru următoarele afecțiuni ale picioarelor: DEGET DEFORMAT, BĂTĂTURI, NODURI, ARTRITĂ, DEGETUL ÎN CIOCAN și alte afecțiuni.

PACHETUL INCLUDE:

- 1 pereche de corectoare din silicon pentru monturi Hallux

SPECIFICAȚIILE PRODUSULUI:

Material: Silicon de calitate
Mărime universală

AVERTIZĂRI


- Înainte de a începe AVERTISMENT: Persoanele care suferă de diabet zaharat sau cele cu circulație deficitară (circulație periferică deficitară) NU trebuie să utilizeze corectoarele de monturi Hallux. Dacă aveți nelămuriri, întrebați furnizorul de servicii medicale dacă Hallux este benefic pentru dumneavoastră.
- Nu expuneți produsul la lumina directă a soarelui, la temperaturi ridicate sau la alte condiții care ar putea provoca deteriorarea acestuia

INDICAȚII:

GHID RAPID: Începeți să purtați corectoarele timp de 5-15 minute și creșteți cu 5 minute pe sesiune până când îl puteți purta confortabil timp de 30 de minute sau mai mult. Acordați mușchilor piciorului suficient timp să se adapteze pe măsură ce îi întindeți. Purtați corectoarele în timp ce vă relaxați în timpul serii, ca parte a rutinei de zi cu zi.

ATENȚIE

- ✓ Purtați mai rar dacă durerea se agravează și aveți grijă atunci când mergeți în timp ce le purtați. Adresați-vă medicului dumneavoastră pentru sfaturi mai exacte dacă aveți o afecțiune a piciorului.
- ✓ Pentru un efect mai liniștitor, țineți corectoarele sub apă caldă sau răciți-le în frigider înainte de a le purta.

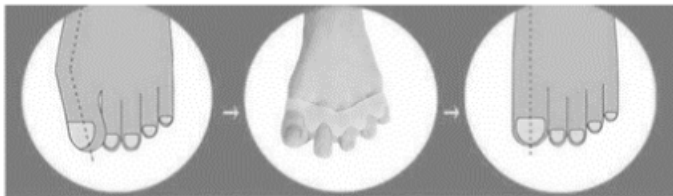

GHID PAS CU PAS:

1. Începeți încet

Începeți încet purtați corectoarele Hallux din ce în ce mai mult, măbind durata în trepte de la o jumătate de oră până la o oră în fiecare zi. Începeți să le purtați prin casă și, în cele din urmă în pantofi. Așteptați-vă ca picioarele și alte părți ale corpului să se simtă diferit în timp ce degetele de la picioare se aliniază în poziția lor naturală, fiind chiar posibil ca pentru o vreme să simțiți durere.

* Cele mai bune rezultate se văd atunci când utilizați corectoarele Hallux atât în timpul activităților fizice, cât și atunci când vă odihniți.

Vă rugăm să vă adresați medicului dumneavoastră dacă aveți întrebări sau nelămuriri.

2. Purtați corectoarele în pantofi

Purtați corectoarele Hallux numai în pantofi care sunt suficient de largi în zona degetelor pentru a permite purtarea lor fără a vă strânge piciorul. Asigurați-vă că pantofii sunt suficient de largi. Scoateți brânțul, plasați corectoarele Hallux pe picior, călcați pe brânț și observați piciorul. În cazul în care vreo parte a piciorului dumneavoastră iese în afara brânțului, atunci acești pantofi nu sunt adecvați purtării corectoarelor Hallux.



3. Încercați-le cu șosete cu degete

Șosetele cu degete sunt concepute pentru a le purta pe picioarelor dumneavoastră, așa cum purtați mănușile pe mâini. Acestea sunt șosetele perfecte de purtat cu corectoarele Hallux și pot ajuta și ele la purtare și confort.

INSTRUCȚIUNI DE ÎNGRIJIRE

În cazul în care corectoarele Hallux se murdăresc, pur și simplu spălați-le manual cu săpun și apă caldă și lăsați-le să se usuce în aer. Asigurați-vă că vă păstrați corectoarele Hallux într-un loc sigur. A nu se lăsa la îndemâna copiilor mici și a animalelor de companie.

- Spălați-le cu apă de săpun pentru mâini
- Uscați la umbră
- În cazul în care corectoarele sunt lipicioase, puneți aplicați pudră de talc pe ele
- A se păstra într-un loc uscat, cu aerisire bună

Întrebări frecvente

Î: Care este durata de timp până la obținerea unui rezultat?

R: Depinde de fiecare situație specifică. În mod normal, veți **simți ușurare după ce le-ați purtat** timp de o lună peste noapte.

Î: Se potrivește cu dimensiunea bărbaților?

R: Nu ar trebui să aveți probleme. Cele două corectoare sunt realizate dintr-un material elastic care preia forma piciorului dumneavoastră. **Mărimea este universală.**

Î: Pot să le spăl?

R: Da, puteți. Le puteți spăla cu mâna. Se usucă destul de repede și rezistă bine în timp.

Î: Setul este livrat cu unul sau cu 2 corectoare din silicon?

R: Setul este livrat cu **1 pereche / 2 bucăți de corectoare.**

Î: Corectoarele trebuie purtate întreaga zi sau pot fi purtate noaptea în timpul somnului?

R: Pentru un confort sporit, **vă recomandăm să le purtați în primul rând în timpul somnului** și să le purtați ocazional atunci când vă plimbați.

Precizări legale: Informațiile din acest manual se bazează pe cunoștințele, cercetările și experiența noastră și sunt oferite numai în scopuri educaționale. Informațiile nu sunt concepute ca sfat medical sau pentru a înlocui o relație individuală cu un profesionist calificat din domeniul sănătății. Cititorul ar trebui să fie avertizat că există un risc inerent asumat generat de schimbarea încălțăminte și de participarea la orice formă de activitate fizică. Având în vedere acest lucru, cititorii sunt încurajați să ia propriile decizii de îngrijire a sănătății pe baza cercetărilor personale și în parteneriat cu un profesionist calificat din domeniul sănătății.



Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare



Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie aruncat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna dispozitivul folosit, vă rugăm să utilizați sistemele de retur și colectare sau să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua acest produs pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele Directivelor CE aplicabile.