

## NAIL PRO

Škarice za zadebljane ili urasle nokte na nožnim prstima



### KORISNIČKI PRIRUČNIK

Zahvaljujemo vam na kupnji proizvoda.

Ovaj alat ima posebne podstavljene, neklizajuće ručke koje vam pružaju optimalnu kontrolu tijekom rezanja. Njegov ergonomski dizajn čini ga idealnim za ljude s artritisom, slabim rukama ili nedostatkom fleksibilnosti. Naše škarice i grickalice imaju ručno izoštrene rezne rubove s oblikovanim vrhom koji omogućuju precizno i čisto rezanje. Nehrđajući čelik medicinske kvalitete znači da ne trebate brinuti hoće li zahrđati ili korodirati. Obećavamo vam: ovo će biti vaše škarice za nokte u godinama koje dolaze.

#### PAKIRANJE UKLJUČUJE:

- 1 x škarice za nokte sa širokim otvaranjem čeljusti
- 1 x grickalica za nokte
- 1 x rašpica za nokte
- 1 x podizač noktiju
- 1 x potiskivač kože oko nokta
- 1 x vrećica za pohranu

#### TEHNIČKI PODACI O PROIZVODU:

Ovaj komplet za uređivanje noktiju na nožnim prstima napravljen je za različite svrhe: kao pomoć škaricama za rezanje noktiju na nožnim prstima, kao grickalica za rezanje debelih noktiju, grickalica za snažno rezanje i pomoć pri liječenju gljivica na noktima (**uzrokovane dijabetesom, zadebljanjem noktiju itd.**).

## UPOZORENJA

- Ovaj je proizvod iznimno oštar. Čuvajte ga izvan dohvata djece.
- Dezinficirajte prije upotrebe.  
Kada se upotrebljava, pripazite da ne povučete kožu, treba je izravno rezati.
- Ako se pojave upale, otekline ili bol, najprije dezinficirajte nokte na nogama i škarice za nokte (jodom ili vodikovim peroksidom), a zatim ih odrežite i još jednom dezinficirajte.
- **BUDITE OPREZNI:** Nemojte 'rezati nokte unutarnjim rubom oštrice jer je to bolno.
- Opruga ručice škarica za nokte ispravno radi samo s jednom oprugom. Nikada ne gurajte obje strane opruga prema gore i nemojte ih upotrebljavati istodobno.
- Korisnicima koji imaju ozbiljne slučajeve uraslih noktiju preporučuje se profesionalni tretman. Nemojte sami korigirati nokte ako niste pediker.

## UPUTE:

1. Očistite prljavštinu u utoru nokta i oslobodite urasli nokat oštrim dijelom potiskivača.
2. Škaricama za nokte odrežite višak noktiju.
3. Vrh kliješta škarica može pokupiti ostatke iz utora nokta, a prikladan je i za tretiranje paronihije i onihomikoze.

## METODE UPOTREBE:

**Namočite stopalo:** Kada močite stopalo, stavite nekoliko žlica soli ili antibakterijskog sapuna u vodu. Nokat će biti mekan nakon namakanja od otprilike 10 minuta, nakon čega će rezanje biti manje bolno.

**Čišćenje:** Nakon svake upotrebe proizvod treba očistiti alkoholom kako bi se produžio njegov vijek trajanja, a i kako bi se izbjeglo množenje bakterija.

**Opres:** Osobe koje imaju paronihiju ili osobe kod kojih je nokat uzrokovao oticanje i infekciju trebaju očistiti svoje nokte i škarice i biti sigurni da na njima nema bakterija.

## TOPLI SAVJETI:

- Prije rezanja debelih noktiju namočite ih 5 minuta u toploj vodi da nokti omekšaju.
- Tijekom rezanja nokta škaricama za urasle nokte na nožnim prstima potrebno je gurnuti samo jednu oprugu na ručki prema gore. (Druga služi samo kao rezerva).
- Otvorite oštricu škarica za nokte na nožnim prstima kako bi se prilagodila zakrivljenosti nokta te kako biste glatko odrezali nokat.
- Oštrica je iznimno oštra. Kad ne upotrebljavate škarice za nokte na nožnim prstima, stavite na njih plastični sigurnosni poklopac.
- Pacijentima s teškim slučajevima uraslih noktiju preporučuje se profesionalno liječenje.

### Upute za recikliranje i odlaganje u otpad



Ova oznaka ukazuje na to da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim otpadom iz domaćinstva na području Europske unije. Kako bi se spriječilo moguće zagađenje okoliša ili pogoršanje zdravlja ljudi zbog nekontroliranog odlaganja otpada, odgovorno

reciklirajte otpad i zalažite se za održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa. Ako želite vratiti upotrijebljeni uređaj, koristite se sustavima za povrat i prikupljanje proizvoda ili se obratite prodavaču na prodajnom mjestu na kojemu ste kupili proizvod. Na tim mjestima možete predati ovaj proizvod na siguran i ekološki postupak recikliranja.



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva EZ-a.