

NAIL PRO

Tagliaunghie per unghie ispessite o incarnite



MANUALE D'USO

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto.

Questo strumento è dotato di una speciale impugnatura rivestita e antiscivolo che offre un controllo ottimale durante il taglio. Il suo design ergonomico lo rende ideale per le persone con artrite, mani deboli o mancanza di flessibilità. I nostri tagliaunghie hanno lame taglienti, affilate a mano, con una punta sagomata per consentire un taglio preciso e pulito. L'acciaio è inossidabile per uso medico per cui non arrugginiscono né si corrodono. Lo promettiamo: questi saranno i suoi tagliaunghie preferiti per gli anni a venire.

LA CONFEZIONE INCLUDE:

- 1 x tagliaunghie per unghie del piede con apertura a ganascia larga
- 1 x tagliaunghie per unghie delle mani con para-schizzi
- 1 x lima per unghie
- 1 x sollevatore per unghie
- 1 x spingi-cuticole
- 1 x custodia

SPECIFICHE DEL PRODOTTO:

Questo set per le unghie è stato pensato per una varietà di usi tra cui il sostegno alle forbicine per le unghie dei piedi, le tronchesine per unghie dei piedi ispessite o indurite e l'aiuto nel trattamento dei funghi dell'unghia del piede (**causato dall'indurimento delle unghie dei piedi dovuta al diabete ecc.**).

Materiale: acciaio inossidabile + ABS

AVVERTENZE

- Questo prodotto è molto affilato. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Disinfettare prima dell'uso.
Durante l'uso, tagliare direttamente senza tirare la pelle.
- Se si soffre di infiammazioni, gonfiore o dolore, disinfettare prima le unghie dei piedi e il tagliaunghie (con iodio o perossido di idrogeno), quindi tagliarle e disinfettarle nuovamente.
- **ATTENZIONE:** Non tagliare l'unghia con il bordo interno del tagliaunghie, sarà doloroso.
- La molla del tagliaunghie nell'impugnatura funziona correttamente con una sola molla. Non spingere mai verso l'alto entrambe le molle e non utilizzarle contemporaneamente.
- Per gli utilizzatori con unghie incarnite gravi, si consiglia un trattamento professionale, non correggere le unghie da soli se non si è esperti di podologia.

INDICAZIONI:

1. Rimuove lo sporco dalla scanalatura dell'unghia e raccoglie l'unghia incarnita con una pinzetta.
2. Usi il tagliaunghie per tagliare i residui di unghia in eccesso.
3. La punta della pinza può raccogliere il residuo del solco dell'unghia ed è utile nel trattamento di paronichia e onicomicosi.

MODALITA' DI UTILIZZO:

Immerga il piede in un bagno: Immergendo il piede, aggiunga qualche cucchiaino di sale o sapone antibatterico nell'acqua. L'unghia si ammorbidirà dopo circa 10 minuti di immersione. In questo modo il taglio sarà molto meno doloroso.

Pulizia: Dopo ogni utilizzo, il prodotto deve essere pulito con alcool per prolungarne l'uso oltre che per evitare germi.

Attenzione: Per le persone che hanno sviluppato paronichia o per coloro a cui l'unghia ha causato gonfiore e infezione: si prega di lavare con cura e disinfettare le unghie e il tagliaunghie per assicurarsi che siano privi di batteri.

SUGGERIMENTI IMPORTANTI:

- Prima di tagliare le unghie ispessite, le immerga in acqua tiepida per 5 minuti per farle ammorbidire.
- Quando si taglia l'unghia con un tagliaunghie per unghie incarnite, solo una delle molle sull'impugnatura deve essere sollevata. (L'altra è di riserva).
- Apra la lama del tagliaunghie verso il basso per adattarla alla curvatura dell'unghia in modo da poter tagliare le unghie senza problemi.
- La lama è molto affilata. Quando il tagliaunghie non è in uso, è opportuno inserire la copertura di sicurezza in plastica.
- Per i pazienti con unghie incarnite gravi, si consiglia un trattamento professionale.

Istruzioni per il riciclaggio e lo smaltimento



Questo marchio indica che questo prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici in tutta l'UE. Per prevenire possibili danni all'ambiente o alla salute umana derivanti dallo smaltimento incontrollato dei rifiuti è necessario riciclarlo

responsabilmente per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Possono ritirare questo prodotto ed avviarlo ad un riciclaggio sicuro per l'ambiente.



Dichiarazione del produttore sulla conformità ai requisiti delle direttive CE applicabili.