

NASALEX ELEKTROMOS ORRSZÍVÓ

Orrszívó eszköz gyermekeknek



FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Kedves vásárló!

Köszönjük, hogy megvásárolta a Nasalex elektromos orrszívót gyermekeknek. Kíméletesen megnyitja a baba bedugult orrjáratait. Enyhíti a légszomjat, javítja a közérzetet, valamint segít a baba megfázásának gyógyításában. Állítható szívóerő és USB töltés.

Kérjük, hogy az elektromos orrszívó használata előtt olvassa el figyelmesen az alábbi utasításokat.

JELLEMZŐK:

- Öt állítható fokozat, a megfelelő fokozat egy kapcsoló segítségével választható ki, könnyen és kényelmesen használható, megfelel a különböző igényeknek
- Élelmiszeripari minőségű szilikon szívófej és fúvóka, amely puha és bőrbarát
- Szétszedhető kialakítás a kényelmes tisztításért
- Ergonomikus kialakítás, amely kényelmes fogást biztosít
- USB kábellel tölthető, könnyű töltés és tartós használat
- A védelmi kialakítás megakadályozza, hogy a váladék visszakerüljön az orrba

A CSOMAG TARTALMA

- 1 x orrszívó (főegység)
- 2 x szívófej
- 1 x csomag szivacs,
- 1 x USB kábel



MŰSZAKI ADATOK:

- Motor feszültsége: 3V
- Maximális vákuum szívóerő: 350 Hgmm (60kPa)
- Tárolás: -10 — 55°C (a relatív páratartalom 85% alatt)
- Üzemeltetés: 16 — 35 °C (a relatív páratartalom 85% alatt)
- USB kábel hossza: kb. 77cm
- Anyag: Szilikon
- Alkalmazható: 0 — 6 éves korig
- Szívófej két méretben:
 - Gömbölyű fej: Újszülöttek számára
 - Tölcséres fej: 2 éves kortól



FIGYELMEZTETÉS

A figyelmeztetések figyelmen kívül hagyása és az összeszerelési utasítások be nem tartása súlyos sérülést vagy halált okozhat.

- A termék nem játékszer
- A termék a felesleges orrváladék eltávolítására szolgál. Ne használja más célra.
- Használat előtt győződjön meg arról, hogy a szilikon műanyag fúvóka szilárdan fel van szerelve a bemeneti végen.
- A terméket személyes használatra tervezték. Ne használja a terméket mással közösen, mert ez elősegítheti a fertőző betegségek terjedését.
- A terméket kizárólag otthoni használatra tervezték. Nem alkalmazható kereskedelmi vagy orvosi célra.

- Mielőtt kinyitja a fedelet, a tokot törölje szárazra.
- A terméket ne tisztítsa hígítóval, benzollal vagy más oldószerrel.
- Ne használjon sérült vagy deformálódott terméket. Ha a termék hibás, küldje vissza az eladónak.
- A terméket kizárólag hozzáértő felnőtt általi használatra tervezték, a gyermek általi használat szigorúan tilos.
- A gyermek orrváladékának eltávolításán kívül a terméket semmilyen egyéb célra ne használja.
- A fúvókát szigorúan tilos hosszú ideig a baba orrlyukában tartani; néhány másodperc elegendő az orrváladék eltávolításához.
- Ne nyomja bele a fúvókát az orrlyukba; az orrlyuk külső oldalával való érintkezés elegendő ahhoz, hogy a gép jól működjön.
- Ne használja a terméket, ha az orrban seb, gyulladás vagy vérzés lép fel; a termék nem használható fül-orr-gégészeti kezelés után sem.
- Ügyeljen arra, hogy használat előtt és után a terméket a tisztítási előírásoknak megfelelően megtisztítsa.
- A terméket száraz és hűvös helyen tárolja.
- Az orrszívót tartsa távol a hőforrásoktól, például kandallótól, radiátortól, kályhától és egyéb készülékektől. A hő károsíthatja a tokot vagy az elektromos alkatrészeket.
- A készítmény gyógyászati célra nem használható. Ha bármilyen egészségügyi probléma lépne fel, azonnal hagyja abba a termék használatát és forduljon orvoshoz.

ALKATRÉSZEK



1. FÚVÓKA
2. BURKOLAT
3. VÁLADÉK TÁROLÓ FOGLALAT
4. SZÍVÓTÖRZS

ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ



Az összeszerelendő alkatrészek.



Szerelje fel a tárolónyílás fedelét



Szerelje fel a burkolatot és fordítsa el az óramutató járásával megegyező irányba, végül rakja fel a fejet/fúvókát



Ha a készüléket szétszerelné, kövesse a lépéseket visszafelé.

Mindig győződjön meg róla, hogy a szűrőszivacs a tárolónyílás alá kerül. Ha a szűrőszivacs piszkos, ki kell cserélni. Kérjük, cserélje ki és szerelje össze a készüléket a fent leírtak szerint.

HASZNÁLAT ELŐTT:

1. Használat előtt 10 percig áztassa a szívófúvókát meleg sós vízben a fertőtlenítéshez, majd szerelje össze az orrszívót az utasításoknak megfelelően. Kapcsolja be a gépet, és indítsa el az orrvádék szívását az orrfalról.
2. **Mit tegyen a száraz váladékkal?** Használja a megvásárolt sóoldatot vagy orrspray-t. Fújjon be az orrlyukakba, majd 4-5 perc múlva használja a készüléket.
3. **A termék töltése:**



A termék feltöltéséhez csatlakoztassa az USB kábelt a töltőhöz (nem tartozék) vagy a számítógéphez. A piros lámpa világít töltéskor; a zöld lámpa világít, ha a készülék feltöltött.

4. FIGYELEM: KÉRJÜK, NE PRÓBÁLJA MEG ERŐVEL KISZÍVNI A BABA ORRÁBÓL A SZÁRAZ VÁLADÉKOT!

HASZNÁLATI UTASÍTÁSOK:

1. Szerelje össze az orrszívót a fenti utasításoknak megfelelően, majd az indításhoz nyomja meg a kapcsolót.


Állítsa be a szívóerőt:



1. fokozat (alacsony): nyomja meg a bekapcsológombot egyszer
 2. fokozat (alacsony): nyomja meg a bekapcsológombot kétszer
 3. fokozat (közepes): nyomja meg a bekapcsológombot háromszor
 4. fokozat (magas): nyomja meg a bekapcsológombot négyszer
 5. fokozat (magas): nyomja meg a bekapcsológombot ötször
- A készülék kikapcsolásához nyomja meg hatszor a bekapcsológombot.

2. Ha az orrváladék száraz, a szívás előtt permetezzen sóoldatot vagy orrspray-t az orrlyukba. A szívás előtt kb. 1-2 perccel permetezzen sóoldatot a gyermek orrlyukába, ez meglazítja a váladékot és segíti az eltávolítást.

3. Tartsa a babát függőlegesen, és helyezze be a fejet a baba orrába. Ügyeljen arra, hogy ne helyezze túl mélyre a fejet az orrlyukba, illetve ne nyomja neki az orrlyuk belső falának. Ügyeljen arra, hogy a szívófejet 90°-os szögben tartsa. Ne irányítsa felfelé az orrlyukba. Hagyja, hogy a szívóka kb. 3-5 másodpercig működjön, és győződjön meg arról, hogy az orrváladék a tárolóba áramlik. Szükség szerint ismételje meg a műveletet a másik orrlyukban.

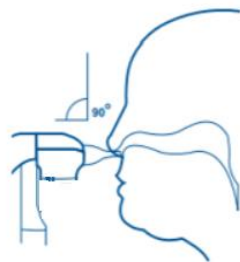

A LEGJOBB EREDMÉNYÉRT: miközben az orrszívót az egyik orrlyukban használja, óvatosan zárja le a másik orrlyukat az ujjával (1-2 másodpercig), ez megkönnyíti a váladék eltávolítását.

4. Tisztítsa meg az alkatrészeket.

FIGYELMEZTETÉS: SOHA ne helyezze az orrszívót túl mélyre az orrlyukba. Soha ne nyomja hozzá a fejet erősen az orrlyuk belső falához. A készüléket soha ne használja fülben, szájbán vagy szemben. Ez az orrszívó az orrjáratok tisztítására szolgál. Ne használja az eszközt a rendeltetésétől eltérő célra.

MEGJEGYZÉS:

- Kérjük, konzultáljon orvosával arról, hogy mikor és milyen gyakran kell kitisztítani a baba orrjáratait.
- Amikor a tároló megtelt, állítsa le a készüléket és tisztítsa ki.

TISZTÍTÁS ÉS KARBANTARTÁS

Minden egyes használat után tisztítsa meg a szívófűvőkát és a többi mosható alkatrészt.

Először szedje le az összes eltávolítható részt. Válassza külön az orrszívó szívórészét a törzstől úgy, hogy a hüvelykujját a fej alá helyezi és lehúzza a szívó részt az orrszívóról. Fogja meg a burkolatot és húzza félre (ha nehezen megy, fordítsa el egy kicsit az óramutató járásával megegyező irányba). Távolítsa el a váladék tároló foglalatot az óramutató járásával ellentétes irányba való forgatással.

A váladékgyűjtőt, a burkolatot és a fűvőkát alaposan mossa át vízzel. Sterilizálja ezeket forró vízzel vagy gőzzel.



Megjegyzés:

A szívótörzs nem mosható, kérjük, ne tegye a törzset vízbe. A törzs nem vízálló, ne tisztítsa vízben öblítéssel. A törzset törölje le puha, nedves ruhával.

HIBAELHÁRÍTÁS:

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A készülék nem működik.	A szívófej nincs megfelelően felszerelve	Ellenőrizze a szívófejet, és győződjön meg róla, hogy megfelelően van-e felszerelve (kövesse az utasításokat).
	A váladéktároló megtelt vagy piszkos	Tisztítsa meg a készüléket a "Tisztítás" részben leírtak szerint.
	A készülék lemerülhetett.	Töltse fel a készüléket.
A szívás gyenge, vagy a készülék egyáltalán nem szív.	A készülék lemerült	Töltse fel a készüléket
	A váladéktároló megtelt vagy piszkos	Tisztítsa meg a készüléket a "Tisztítás" részben leírtak szerint.
Láthatatlan orrváladék van az orrüregben	A szívó rész nem érinti az orrot, a szíváshoz vákuumra van szükség	Hagyja, hogy a baba álljon vagy félig fekvődjön, fejjel felfelé (ha az orr száraz, először használjon sóoldatot vagy orrspray-t az orrüreg benedvesítésére).



Újrahasznosítás és ártalmatlanítás



Ez a jelölés azt jelzi, hogy a terméket az Európai Unió egész területén tilos más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. Az ellenőrizetlen hulladékártalmatlanítás által okozott, környezeti vagy emberi egészségre gyakorolt esetleges károk megelőzése érdekében a terméket felelősségteljesen hasznosítsa újra, ezzel is támogatva az erőforrások fenntartható újrafelhasználását. A használt eszközeinek visszaküldéséhez kérjük, használja a visszaküldő és gyűjtő rendszereket, vagy lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, akinél a terméket vásárolta. A kiskereskedő tudja biztosítani a termék környezetbarát és biztonságos újrahasznosítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel a vonatkozó EK irányelvek követelményeinek.