

ELEKTRYCZNY ASPIRATOR DO NOSA NASALEX

Urządzenie do wydmuchiwania nosa dla dzieci



INSTRUKCJA OBSŁUGI

Szanowny kliencie,

Dziękujemy za zakup naszego wyjątkowego produktu - elektrycznego aspiratora do nosa dla dzieci Nasalex. Aspirator delikatnie odblokowuje zatkany nos dziecka. Łagodzi duszności, poprawia samopoczucie i pomaga leczyć przeziębienie Twojego dziecka. Regulowana moc ssania i ładowanie USB.

Przed użyciem tego elektrycznego aspiratora do nosa należy uważnie przeczytać poniższe instrukcje.

CHARAKTERYSTYKA:

- Pięć prędkości, które można regulować i wybierać za pomocą jednego przycisku kontrolnego, co zapewnia łatwość i wygodę obsługi dla zaspokojenia różnych potrzeb;
- Głowica i końcówka ssąca wykonane ze spożywczego silikonu, zapewniającego delikatność i przyjazność dla skóry;
- Odpinana konstrukcja dla wygody czyszczenia;
- Ergonomiczna konstrukcja z odpowiednio dopasowanym nachyleniem, umożliwiającą wygodne trzymanie;
- Produkt umożliwiający ponowne naładowanie przy użyciu kabla USB, co zapewnia łatwość ładowania i trwałość;
- Projekt zapobiegający refluksowi, pozwalający uniknąć sphywania kataru z powrotem do nosa.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

- 1 x aspirator do nosa (jednostka główna)
- 2 x końcówka ssąca
- 1 x opakowanie gąbeczek,
- 1 x kabel USB



INFORMACJE TECHNICZNE:

Napięcie silnika: 3V

Maksymalne ssanie próżniowe: 350mmHg (60kPa)

Warunki przechowywania: -10 - 55°C (przy wilgotności względnej w granicach 85%)

Warunki pracy: 16 - 35 °C (przy wilgotności względnej w granicach 85%)

Długość kabla USB: ok. 77 cm

Materiał: Silikon

Odpowiedni dla dzieci w wieku: 0 - 6 lat

2 Rozmiary Końcówek do Nosa :

Końcówka w kształcie gruszki:

dla noworodków

Końcówka lejka: 2 lata lub więcej



Odpowiednia

UWAGA

Nieprzestrzeganie niniejszych ostrzeżeń i instrukcji montowania końcówek może doprowadzić do poważnych obrażeń lub śmierci.

- Ten produkt nie jest zabawką
- Ten produkt jest przeznaczony do usuwania nadmiaru wydzieliny nosowej. Nie należy stosować go do żadnych innych celów.
- Przed użyciem upewnij się, że silikonowa końcówka została dobrze zamocowana na końcówce wlotowej.

- Produkt powinien być wykorzystywany wyłącznie do użytku osobistego. Nie pożyczaj aspiratora innym osobom, ponieważ może przyczynić się to do rozprzestrzeniania chorób zakaźnych.
- Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku domowego. Nie powinien być on stosowany w celach komercyjnych lub medycznych.
- Wytrzyj obudowę do sucha przed zdjęciem pokrywki.
- Nie myj i nie czyść aspiratora przy użyciu rozcieńczalnika, benzenu lub jakiegokolwiek rozpuszczalnika.
- Należy zaprzestać korzystania z urządzenia, jeśli zostanie uszkodzone lub zdeformowane w wyniku silnego uderzenia, lub zwrócić go sprzedawcy w przypadku wykrycia wad produktu.
- Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku przez dorosłych zgodnie z przeznaczeniem; korzystanie z niego samodzielnie przez dziecko jest surowo zabronione.
- Nie należy stosować produktu do żadnych innych celów poza wysysaniem kataru u dzieci.
- Surowo zabrania się trzymania końcówki w otworze nosowym dziecka przez dłuższy czas; kilka sekund całkowicie wystarczy, aby usunąć wydzielinę.
- Nie wciskaj końcówki do otworu nosowego; dotknięcie zewnętrznej strony nozdrza wystarczy, aby urządzenie spełniło swoją funkcję.
- Nie używaj produktu, jeśli obecne są jakiegokolwiek rany, objawy stanu zapalnego, krwawienie z nosa, a także po przebyłym leczeniu ENT.
- Należy oczyścić produkt przed i po użyciu, stosując się do instrukcji zawartych w sekcji "Czyszczenie".
- Produkt należy przechowywać w suchym i chłodnym miejscu.
- Trzymaj aspirator do nosa z dala od źródeł ciepła, takich jak kominki, grzejniki, piece i inne urządzenia. Ciepło może uszkodzić obudowę lub części elektryczne.
- Produkt nie powinien być używany w celach medycznych. W przypadku wystąpienia jakichkolwiek problemów zdrowotnych, należy natychmiast przerwać korzystanie z produktu i skonsultować się z dyplomowanym lekarzem.

NAZWY CZĘŚCI



1. KOŃCÓWKA
2. OBUDOWA
3. ZBIORNIK DO PRZECHOWYWANIA WYDZIELINY
4. CZĘŚĆ SSĄCA

INSTRUKCJA MONTAŻU



Części do instalacji.



Założ pokrywę zbiornika przechowującego



Założ obudowę i obróć ją w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara;
koniec załóż końcówkę/dyszę

na



W celu rozebrania urządzenia należy wykonać te same kroki w odwrotnej kolejności.

Należy za każdym razem upewnić się, że gąbka filtra umieszczona jest pod zbiornikiem przechowującym. Gdy gąbka filtra się zabrudzi, należy ją wymienić. Wymień ją i załóż w sposób opisany powyżej.

PRZED UŻYCIEM:

1. Przed użyciem należy zdezynfekować końcówkę ssącą, namaczając ją w ciepłej i słonej wodzie przez 10 minut, a następnie złożyć inhalator zgodnie z instrukcjami. Włącz przełącznik i zacznij od wysysania wydzieliny nosowej ze ścianek nosa.

2. **Co zrobić z suchą wydzieliną?** Użyj soli fizjologicznej lub spreju do nosa, który zazwyczaj kupujesz. Rozpyl go na nozdrzach i użyj aspiratora po upływie 4 lub 5 minut.

3. Ładowanie produktu:



Aby naładować produkt, podłącz kabel USB do ładowarki (nie wchodzi w skład zestawu) lub do komputera. Podczas ładowania będzie się świeciło czerwone światelko; po zakończeniu ładowania zaświeci się zielone światelko.

4. UWAGA: należy PAMIĘTAĆ, ŻE NIE WOLNO STOSOWAĆ DUŻEJ SIŁY LUB NIEBEZPIECZNYCH SPOSOBÓW W CELU WYCZYSZCZENIA NOSA DZIECKA!

INSTRUKCJA OBSŁUGI:

1. Złóż aspirator do nosa zgodnie z powyższymi instrukcjami i naciśnij przycisk zasilania, aby go uruchomić.


Dostosuj poziom ssania:



- Naciśnij przycisk zasilania, aby uruchomić urządzenie na niskim poziomie 1.
- Naciśnij przycisk zasilania dwukrotnie, aby uruchomić niski poziom 2.
- Naciśnij przycisk zasilania trzykrotnie, aby uruchomić średni poziom 3.
- Naciśnij przycisk zasilania czterokrotnie, aby uruchomić wysoki poziom 4.
- Naciśnij przycisk zasilania pięciokrotnie, aby uruchomić wysoki poziom 5.
- Naciśnij przycisk zasilania sześciokrotnie, aby wyłączyć urządzenie.

2. W przypadku suchej wydzieliny z nosa można zwilżyć otwory nosowe przy użyciu soli fizjologicznej lub spreju do nosa. Na około 1-2 min przed aspiracją należy rozpylić roztwór soli fizjologicznej w otworze nosowym dziecka, aby rozluźnić śluz i ułatwić wysysanie.

3. Trzymaj dziecko w pozycji pionowej i włóż końcówkę do nosa dziecka. Należy uważać, aby nie umieścić końcówki zbyt daleko w dziurce lub nie docisnąć jej do wewnętrznej ściany nozdrza. Upewnij się, że trzymasz końcówkę aspiratora pod kątem 90°. Nie kieruj go w stronę nozdrzy. Pozwól aspiratorowi pracować przez około 3-5 sekund i obserwuj, jak śluz spływa do komory zbierającej. W razie potrzeby powtórz w drugiej dziurce.

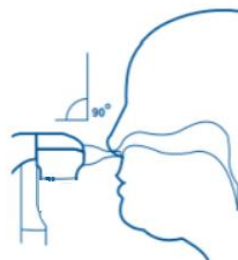

DLA OPTIMALNEGO EFEKTU: podczas używania aspiratora w jednej dziurce, delikatnie zamknij drugą dziurkę palcem (przez 1-2 sekund). Pozwoli to na dokładniejsze i łatwiejsze zebranie wydzieliny.

4. Wyczyść części składowe.

UWAGA: NIGDY nie wkładaj aspiratora zbyt głęboko do nosa. Nigdy nie przystawiaj końcówki zbyt mocno do wewnętrznej ściany nozdrza. Nigdy nie używaj do czyszczenia uszu, ust lub oczu. Ten aspirator przeznaczony jest wyłącznie do czyszczenia zatłoczonych przewodów nosowych. Nie należy używać urządzenia w celach, do których nie jest przystosowany.

UWAGA:

- Porozmawiaj z lekarzem o tym, kiedy i jak często powinnaś aspirować nos dziecka.
- Kiedy zauważysz, że pojemnik zbiorczy jest wypełniony, zatrzymaj urządzenie i wyczyść kubeczek.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Po każdym użyciu należy wyczyścić końcówkę ssącą i inne nadające się do mycia części.

Najpierw zdemontuj wszystkie ściągalne części. Oddziel ssącą część aspiratora od jego podstawy, umieszczając kciuk pod końcówką i odczepiając ją od aspiratora. Zdejmij również obudowę (jeśli jest to trudne, obróć ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Następnie odcep także zbiornik przechowujący wydzielinę, obracając go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Oczyść dokładnie wodą kubeczek zbiorczy, obudowę i końcówkę. Zdezynfekuj wrzącą wodą lub parą.



Uwaga:

Obudowa nie nadaje się do mycia, nie należy wkładać jej do wody w celu wyczyszczenia. Nie próbuj czyścić głównej jednostki, spłukując ją wodą, ponieważ nie jest ona wodoodporna. W celu wyczyszczenia urządzenia wystarczy przetrzeć je miękką, wilgotną szmatką.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW:

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie działa.	Głowica ssąca nie jest ustawiona prawidłowo	Sprawdź głowicę ssącą i upewnij się, że jest ona ustawiona prawidłowo (zgodnie z instrukcjami).
	Kubeczek zbiorczy jest przepełniony lub brudny	Wyczyść urządzenie, jak opisano w rozdziale "czyszczenie".
	Urządzenie może być rozładowane.	Naładuj urządzenie.
Słabe ssanie lub jego całkowity brak.	Urządzenie jest rozładowane	Naładuj urządzenie
	Kubeczek zbiorczy jest przepełniony lub brudny	Wyczyść urządzenie, jak opisano w rozdziale "czyszczenie".
Niewidoczna wydzielina w jamie nosowej	końcówka ssąca nie dotyka nosa, więc w celu przywrócenia wężu należy wykonać wysysanie próżniowe	ustaw dziecko w pozycji stojącej lub w pół leżącej, z głową zwróconą do góry (jeśli nos jest suchy, w pierwszej kolejności należy użyć soli fizjologicznej lub spreju do nosa, aby nawilżyć jamę nosową).



Instrukcje dotyczące recyklingu i utylizacji



Oznaczenie to wskazuje na to, że dany produkt nie powinien być wyrzucany wraz z innymi odpadami komunalnymi na terenie całej UE. Aby zapobiec potencjalnemu zagrożeniu dla środowiska lub ludzkiego zdrowia spowodowanemu niekontrolowanym usuwaniem odpadów, przetwarzaj je w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby pozbyć się zużytego sprzętu, skorzystaj z systemów zwrotu i odbioru, lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego został zakupiony produkt. Może on przyjąć ten produkt dla bezpiecznego recyklingu środowiskowego.



Oświadczenie producenta o spełnieniu przez produkt wymagań określonych w obowiązujących Dyrektywach UE.