

ELEKTRICKÁ NOSNÍ ODSÁVAČKA HLENŮ NSALEX

Odsávací zařízení pro děti



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Vážený zákazníku,

děkujeme za nákup našeho skvělého produktu – elektrické dětské nosní odsávačky hlenů Nasalex. Jemně vyčistí ucpaný nos vašeho dítěte. Zmírňuje dušnost, zlepšuje celkový pocit a pomáhá vyléčit rýmu vašeho dítěte. Nastavitelná úroveň sacího výkonu a nabíjení přes USB.


Před zahájením používání této elektrické nosní odsávačky si pečlivě přečtěte následující pokyny.

VLASTNOSTI:

- Pět rychlostních stupňů lze nastavit a vybrat pomocí jednoho ovládacího prvku, snadno a pohodlně pro uspokojení různých potřeb
- Sací hlava a tryska jsou z potravinářského silikonu, měkké a příjemné na dotek
- Odnímatelná konstrukce pro pohodlné čištění
- Ergonomická konstrukce s humanizovaným radiánem, pohodlně se drží
- Dobíjení prostřednictvím USB kabelu, snadno se nabíjí a je odolná při používání
- Antirefluxní konstrukce brání tomu, aby se hlen dostal zpět do nosu

OBSAH BALENÍ

- 1x nosní odsávačka hlenů (hlavní jednotka)
- 2x sací tryska
- 1x balení houbiček,
- 1x USB kabel

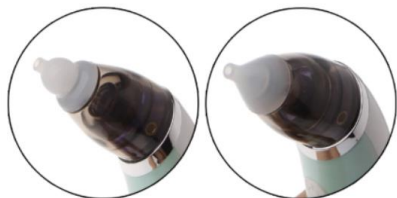

TECHNICKÉ INFORMACE:

Napětí motoru: 3 V

Maximální sací výkon: 350 mmHg (60 kPa)

Podmínky uchování: -10 - 55 °C (relativní vlhkost zůstává v rozmezí 85 %)

Provozní podmínky: 16 - 35 °C (relativní vlhkost zůstává v rozmezí 85 %)

Délka USB kabelu: cca 77 cm

Materiál: silikon

Vhodný věk: 0-6 let

2 velikosti špičky :

Tykvovitá špička: vhodná pro novorozence

Trychtýřovitá špička: pro děti starší 2 let



UPOZORNĚNÍ

Nedodržení tohoto varování a montážních pokynů by mohlo vést k vážnému zranění nebo smrti.

- Tento produkt není hračka
- Tento produkt je navržen pro odstranění nadměrného nosního hlenu. Nepoužívejte jej k žádnému jinému účelu.
- Před použitím se ujistěte, že je silikonová plastová tryska pevně namontována na vstupním konci.
- Produkt by měl být omezen na osobní použití. Nesdílejte produkt s ostatními, protože by to mohlo způsobit šíření infekčních onemocnění.
- Produkt je určen pouze pro domácí použití. Produkt by neměl být používán k žádným komerčním nebo lékařským účelům.
- Otřete kryt předtím, než otevřete víčko.

- Nemyjte a nečistěte přípravek ředidlem, benzenem nebo jakýmkoliv rozpouštědlem.
- Pokud je produkt poškozen nebo zdeformován těžkým úderem, přestaňte jej používat nebo jej vraťte prodávajícímu, pokud je produkt vadný.
- Produkt je určen pouze pro použití kompetentními dospělými osobami a jakékoliv použití samotným dítětem se přísně nedoporučuje.
- Produkt nepoužívejte k žádnému jinému účelu, než je odsávání hlenu dítěte.
- Nenechte trysku umístěnou u nosní dírky dítěte po dlouhou dobu, několik sekund bude pro odstranění hlenu stačit.
- Nesnažte se trysku do nosní dírky nacpat. Dotyk s vnější stranou nosní dírky bude stačit k tomu, aby stroj dobře fungoval.
- Nepoužívejte produkt, pokud má dítě jakoukoli ránu nebo příznak zánětu, pokud krvácí z nosu nebo je po ORL léčbě.
- Před použitím a po použití se ujistěte, že jste produkt vyčistili podle instrukcí uvedených v sekci o čištění.
- Produkt uchovávejte na suchém a chladném místě.
- Držte nosní odsávačku dál od tepelných zdrojů, jako jsou krby, radiátory, kamna a jiná zařízení. Teplo může poškodit kryt nebo elektrické součástky.
- Produkt není určen pro používání k lékařským účelům. Pokud by se vyskytl nějaký problém související se zdravím, přestaňte prosím produkt používat a poraďte se s kvalifikovaným lékařem.

NÁZVY ČÁSTÍ



1. TRYSKA
2. OBAL
3. NÁDOBKKA NA HLEN
4. SACÍ TĚLO

NÁVOD K MONTÁŽI



Součástky k instalaci.



Nasadte kryt nádoby na hlen



Nasadte kryt a otočte ho ve směru hodinových ručiček, nakonec nasadte špičku/trysku
Chcete-li zařízení rozebrat, postupujte podle pokynů pozpátku.

Vždy se ujistěte, že je filtrační houbička vložena pod nádobku na hlen. Když je filtrační houbička špinavá, je třeba ji vyměnit. Vyměňte ji a nasadte tak, jak je popsáno výše.

PŘED POUŽITÍM:

1. Před použitím namočte odsávací trysku do teplé slané vody po dobu 10 minut, aby se vydezinfikovala. Poté nasadte nosní odsávačku podle pokynů. Stiskněte tlačítko a začněte s odsáváním hlenů ze stěny nosu.
2. **Co uděláte se suchým hlenem?** Použijte solný roztok nebo nosní sprej, který si koupíte. Stříknete sprej do nosních dírek a po čtyřech až pěti minutách použijte odsávačku.

3. Nabíjení produktu:



Při nabíjení produktu připojte prosím USB linku k nabíječce (není součástí balení) nebo k počítači. Při nabíjení se rozsvítí červené světlo. Až bude nabíjení ukončeno, rozsvítí se zelené světlo.

4. UPOZORNĚNÍ: PAMATUJTE prosím, NEPOUŽÍVEJTE HRUBOU SÍLU NEBO NEBEZPEČNÉ PROSTŘEDKY PRO ODSÁNÍ SUCHÉHO NOSU!

NÁVOD K POUŽITÍ:

1. Nainstalujte nosní odsávačku podle výše uvedených pokynů a stiskněte tlačítko pro spuštění.


Nastavte úroveň sání:



Stiskněte tlačítko pro spuštění zařízení na nízké úrovni 1.
Stiskněte tlačítko pro spuštění dvakrát a spustíte tím nízkou úroveň 2.
Stiskněte tlačítko pro spuštění třikrát a spustíte tím střední úroveň 3.
Stiskněte tlačítko pro spuštění čtyřikrát a spustíte tím vysokou úroveň 4.
Stiskněte tlačítko pro spuštění pětikrát a spustíte tím vysokou úroveň 5.
Stiskněte tlačítko pro spuštění šestkrát a zařízení vypnete.

2. Pokud je hlen suchý, můžete nejprve použít solný roztok nebo nosní sprej ke stříknutí do nosní dírky. Cca 1-2 min před odsáváním rozprašte solný roztok do nosní dírky dítěte, aby se uvolnil hlen a odsávání bylo snadnější.

3. Držte dítě ve vzpřímené poloze a vložte špičku do jeho nosu. Dávejte pozor, abyste špičku neumístili příliš hluboko do nosní dírky nebo abyste ji netiskli proti vnitřní stěně nosní dírky. Ujistěte se, že je špička odsávačky pod úhlem 90°. Nemířte s ní do nosní dírky. Nechte odsávačku pracovat po dobu zhruba 3-5 sekund a sledujte, jak hlen proudí do sběrné komory. Opakujte i pro druhou nosní dírku a dle potřeby.

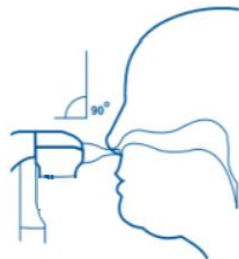

ZÍSKAJTE NEJLEPŠÍ VÝSLEDKY: zatímco používáte odsávačku v jedné nosní dírce, jemně prstem uzavřete druhou nosní dírku (po dobu 1-2 sekund) pro lepší a snadnější odsávání.

4. Vyčistěte součástky.

UPOZORNĚNÍ: NIKDY nevkládejte odsávačku příliš hluboko do nosní dírky. Nikdy netlačte špičku silně proti vnitřní stěně nosní dírky. Nikdy nepoužívejte na uši, ústa nebo oči. Tato odsávačka slouží k uvolnění zacpaných nosních cest. Nepoužívejte zařízení k ničemu jinému, než k čemu je určeno.

POZNÁMKA:

- Poradte se se svým lékařem, kdy a jak často byste měli odsávat nosní cesty dítěte.
- Až uvidíte, že se sběrná nádoba naplňuje, zastavte zařízení a vyčistěte ho.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Po každém použití očistěte sací trysku a další omyvatelné části.

Nejprve rozeberte všechny odnímatelné části. Odsávací část oddělte od základny tak, že umístíte palec pod špičku a odloupnete ji z odsávačky. Chyťte kryt a vytáhněte jej také (pokud to jde těžko, lehce s ním otočte po směru hodinových ručiček). Nyní také odstraňte nádobku na hlen otáčením v protisměru hodinových ručiček.

Sběrnou nádobku, kryt a trysku důkladně očistěte vodou. Sterilizujte vařící vodou nebo párou.



Poznámka:

Trup není omyvatelný, neumísťujte jej tedy prosím do vody, abyste jej vyčistili. Nepokoušejte se vyčistit hlavní jednotku oplachováním vodou, protože není voděodolná. Hlavní jednotku vyčistěte tak, že ji otřete měkkým, vlhkým hadříkem.

ODSTRANĚNÍ ZÁVAD:

| Problém | Možná příčina | Řešení |
|--|---|--|
| Zařízení nefunguje. | Sací hlava není správně umístěna | Zkontrolujte sací hlavu a ujistěte se, že je umístěna správně (postupujte podle pokynů). |
| | Sběrná nádobka je příliš plná nebo špinavá | Vyčistěte zařízení tak, jak je uvedeno v sekci "čištění". |
| | Zařízení může být vybité. | Nabijte zařízení. |
| Odsávání je slabé nebo k němu vůbec nedochází. | Zařízení je vybité | Nabijte zařízení |
| | Sběrná nádobka je příliš plná nebo špinavá | Vyčistěte zařízení tak, jak je uvedeno v sekci "čištění". |
| Neviditelný výtok z nosu v nosní dutině | sací tryska se nedotýká nosu, pro posmrkávání musíte odsávat na principu podtlaku | nechte dítě ve stoje nebo v pololehu, s hlavou nahoru (pokud je nos suchý, použijte nejprve solný roztok nebo nosní sprej pro navlhčení nosní dutiny). |



Pokyny pro recyklaci a likvidaci



Toto označení indikuje, že v rámci celé EU by tento produkt neměl být likvidován společně s odpadem z domácnosti. Aby se zabránilo možnému poškození životního prostředí nebo lidského zdraví z důvodu nekontrolované likvidace odpadu, recyklujte tento produkt zodpovědně pro podporu udržitelného využívání materiálních zdrojů. Pro vrácení použitého zařízení využijte systém sběru a recyklace nebo kontaktujte prodejce, u kterého byl produkt zakoupen. Může tento produkt převzít pro ekologicky bezpečnou recyklaci



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky platných směrnic ES.