

ELEKTRIČNI NOSNI ASPIRATOR NASALEX

Oprema za šmrcaanje za djecu



KORISNIČKI PRIRUČNIK

Poštovani korisniče,

Zahvaljujemo što ste kupili naš sjajni proizvod – električni nosni aspirator za djecu Nasalex. Nježno otvara začepljen nos vašeg djeteta. Ublažava kratkoću daha, poboljšava dobrobit i pomaže izliječiti prehladu vašeg djeteta. Podesiva snaga usisavanja i USB punjenje.


Pažljivo pročitajte sljedeće upute prije nego što počnete koristiti ovaj električni nosni aspirator.

KARAKTERISTIKE:

- Pet brzina može se prilagoditi i odabrati jednom tipkom za upravljanje, jednostavno i prikladno za ispunjavanje različitih potreba
- Netoksična silikonska usisna glava i sapnica, meka i prijatna za kožu
- Rastavljiv dizajn za jednostavno čišćenje
- Ergonomski dizajn, humaniziranog radijana, ugodan za držanje
- Punjivi dizajn s USB kabelom, jednostavan za punjenje i izdržljiv za upotrebu
- Anti-refluksni dizajn, može spriječiti povratak nosne sluzi u nos

SADRŽAJ PAKETA

- 1 x nosni aspirator (glavna jedinica)
- 2 x usisna sapnica
- 1 x Paket spužvi,
- 1 x USB kabel

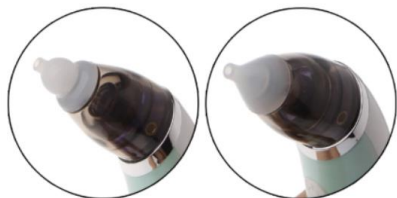

TEHNIČKE INFORMACIJE:

Napon motora: 3V

Maksimalno vakuumsko usisavanje: 350 mmHg (60kPa)

Uvjeti skladištenja: -10 - 55 ° C (relativna vlaga ostaje unutar 85 posto)

Radni uvjeti: 16 - 35 ° C (relativna vlaga ostaje unutar 85 posto)

Dužina USB kabela: oko 77cm

Materijal: Silikon

Prikladna dob: 0 - 6 godina

2 veličine nastavaka za nos:

Vrh glave: Pogodan za novorođenčad

Vrh cijevi: 2 godine ili starije



UPOZORENJA

Nepridržavanje ovih upozorenja i uputa za montažu, može dovesti do ozbiljnih ozljeda ili smrti.

- Ovaj proizvod nije igračka
- Ovaj je proizvod dizajniran za uklanjanje prekomjerne nosne sluzi. Ne koristite u bilo koje druge svrhe.
- Prije uporabe provjerite je li silikonska plastična sapnica čvrsto postavljena na ulaznom kraju.
- Proizvod treba ograničiti na osobnu uporabu. Ne dijelite proizvod s drugima jer to može pomoći širenju zaraznih bolesti.
- Proizvod je dizajniran samo za kućnu uporabu. Ne smije se primjenjivati u bilo koju komercijalnu ili medicinsku svrhu.
- Obrišite kućište prije nego što otvorite poklopac.

- Ne perite i ne čistite proizvod razrjeđivačem, benzenom ili bilo kojim otapalom.
- Prestanite s korištenjem proizvoda ako je oštećen ili deformiran zbog snažnog udarca ili ga vratite prodavaču ako je proizvod neispravan.
- Proizvod je dizajniran samo za kompetentnu uporabu odraslih osoba; bilo kakva uporaba od strane djeteta strogo je zabranjena.
- Ne koristite proizvod u bilo koju drugu svrhu osim za usisavanje tekuće nosne sluzi djeteta.
- Strogo je zabranjeno držati sapnicu u dječjoj nosnici dulje vrijeme; nekoliko sekundi bit će dovoljno za uklanjanje sluzi.
- Ne gurajte jako sapnicu u nosnicu; lagani dodir sa vanjskom stranom nosnice bit će dovoljan da uređaj dobro radi.
- Ne koristite proizvod ako postoji rana ili simptom upale ili krvarenja u nosu ili nakon ENT liječenja.
- Obavezno očistite proizvod prije i nakon uporabe, pogledajte odjeljak Čišćenje.
- Čuvajte proizvod na suhom i hladnom mjestu.
- Nosni aspirator držite podalje od izvora topline, poput kamina, radijatora, štednjaka i ostalih uređaja. Toplina može oštetiti kućište ili električne dijelove.
- Proizvod se ne smije koristiti u medicinske svrhe. Ako postoji bilo kakav zdravstveni problem, odmah prestanite koristiti proizvod i posavjetujte se s kvalificiranim liječnikom.

NAZIVI DIJELOVA



1. SAPNICA
2. KUĆIŠTE
3. MJESTO ZA POHRANU ŠMRKALJA
4. KUĆIŠTE ZA USISAVANJE

UPUTE ZA SASTAVLJANJE



Dijelovi koje treba postaviti.



Postavite poklopac mjesta za pohranu



Postavite zaštitu i okrenite je u smjeru kazaljke na satu, konačno instalirajte vrh / sapnicu

Ako želite rastaviti uređaj, slijedite korake unatrag.

Uvijek pazite da se filtrirska spužva umetne ispod mjesta za pohranu. Kada je filtrirska spužva prljava, treba je zamijeniti, zamijenite je i postavite na način opisan gore.

PRIJE UPORABE:

1. Prije uporabe, namočite usisnu sapnicu u toploj slanoj vodi na 10 minuta za dezinfekciju, a zatim postavite nosni aspirator prema uputama. Uključite prekidač i započnite s usisavanjem nosne izlučevine iz nosne stijenke.

2. **Što radite sa suhim šmrkljima?** Koristite fiziološku otopinu ili sprej za nos koji kupujete. Pošpricajte u nosnice i nakon četiri do pet minuta koristite aspirator.

3. **Napunite proizvod:**



Kad punite proizvod, priključite USB liniju na punjač (nije uključen) ili na računalo. Crveno svjetlo će se upaliti tijekom punjenja; zeleno svjetlo će se upaliti kad je napunjen.

4. PAŽNJA: molim vas, ZAPAMTITE, NE KORISTITE JAKU SILU ILI GRUBA SREDSTVA ZA USISAVNAJE DJEČJEG NOSA!

UPUTE ZA UPORABU:

1. Postavite nosni aspirator prema navedenim uputama i pritisnite prekidač za uključivanje.


Podesite razinu usisavanja:



Pritisnite električni gumb da biste pokrenuli uređaj na niskoj razini 1.
Pritisnite električni gumb dvaput za pokretanje niske razine 2.
Pritisnite električni gumb triput za pokretanje srednje razine 3.
Pritisnite električni gumb četiri puta za pokretanje visoke razine 4.
Pritisnite električni gumb pet puta za pokretanje visoke razine 5.
Pritisnite električni gumb šest puta da biste isključili uređaj.

2. Ako je nosni iscjedak suh, prvo možete koristiti fiziološku otopinu ili sprej za nos. Otprilike 1-2 min prije usisavanja pošpricajte fiziološkom otopinom djetetove nosnice kako biste razrijedili sluz i olakšali usisavanje.

3. Držite dijete uspravno i umetnite vrh u djetetov nos. Pazite da vrh ne stavite preduboko u nosnicu ili ne pritisnete na unutarnji zid nosnice. Obavezno držite vrh aspiratora pod kutom od 90 °. Ne usmjeravajte ga duboko u nosnicu. Pustite da aspirator djeluje oko 3-5 sekundi, i promatrajte kako sluz ulazi u skupljačku komoru. Ponovite u drugoj nosnici i po potrebi.

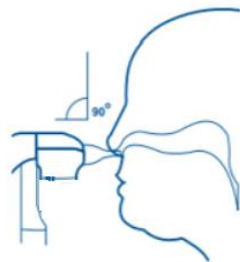

DOBIJTE NAJBOLJE REZULTATE: dok aspirator koristite u jednoj nosnici, prstom nježno zatvorite drugu nosnicu (na 1-2 sekunde), to će poboljšati i olakšati usisavanje.

4. Očistite sastavne dijelove.

PAŽNJA: NIKAD ne stavljajte aspirator preduboko u nosnicu. Nikada ne postavljajte vrh čvrsto na unutarnji zid nosnice. Nikada ne koristite za uši, usta ili oči. Ovaj aspirator služi za čišćenje začepljenja u nosnim prolazima. Ne koristite uređaj za bilo koju drugu svrhu osim njegove predviđene namjene.

NAPOMENA:

- Posavjetujte se s liječnikom o tome kada i koliko često trebate aspirirati nosne prolaze vašeg djeteta.
- Kad vidite da se posuda za prikupljanje puni, isključite uređaj i očistite ga.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Nakon svake uporabe očistite usisnu sapnicu i ostale dijelove koji se mogu prati.

Prvo rastavite sve dijelove za uklanjanje. Odvojite dio za usisavanje aspiratora od baze tako što stavite palac ispod vrha i odvojite ga od aspiratora. Uzmite kućište i povucite ga (ako je teško okrenite ga malo u smjeru kazaljke na satu). Sada uklonite i mjesto za pohranu šmrkalja tako što ćete ga zakrenuti u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.

Posudu za prikupljanje, kućište i sapnicu temeljito očistite vodom. Sterilizirajte kipućom vodom ili parom.



Napomena:

Trup se ne može prati, ne stavljajte ga u vodu. Ne pokušavajte očistiti glavnu jedinicu ispiranjem vodom jer nije voodootporna. Za čišćenje glavne jedinice obrišite je mekom, vlažnom krpom.

RJEŠAVANJE PROBLEMA:

Problem	Mogući uzrok	Riješenje
Uređaj ne radi.	Usisna glava nije pravilno postavljena	Provjerite usisnu glavu i provjerite je li pravilno postavljena (slijedite upute).
	Posuda za odlaganje je prepuna ili prljava	Očistite uređaj kako je spomenuto u odjeljku " čišćenje ".
	Uređaj može biti prazan.	Napunite uređaj.
Usisavanje je slabo ili uopće nema usisavanja.	Uređaj je prazan	Napunite uređaj
	Posuda za odlaganje je prepuna ili prljava	Očistite uređaj kako je spomenuto u odjeljku " čišćenje ".
Nevidljivi nosni iscjedak u nosnoj šupljini	usisna sapnica ne dodiruje nos, za usisavanje trebate usisati vakuumski dio	pustite dijete da stoji ili leži na pola, glavom prema gore (ako je nos suh, prvo upotrijebite fiziološku otopinu ili sprej za nos kako biste navlažili nosnu šupljinu).



Upute za recikliranje i odlaganje



Označavanje ukazuje da se ovaj proizvod ne smije odlagati s ostalim kućnim otpadom diljem EU-a. Kako bi se spriječila moguća šteta okolišu ili ljudskom zdravlju zbog nekontroliranog odlaganja otpada; odgovorno reciklirajte za promicanje održive upotrebe materijalnih resursa. Da biste vratili svoj upotrijebljeni uređaj, koristite sustave za povrat i prikupljanje podataka ili se obratite prodavaču gdje je proizvod kupljen. Oni mogu uzeti ovaj proizvod za recikliranje sigurno za okoliš



Izjava proizvođača da je proizvod u skladu sa zahtjevima primjenjivih direktiva EZ.