

NAIL PRO

Kleštičky na zesílené nebo zarostlé nehty



UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA

Děkujeme vám za zakoupení našeho produktu.

Tento nástroj je vybaven speciální polstrovanou protiskluzovou rukojetí, která vám poskytne optimální kontrolu při stříhání. Jeho ergonomický design je ideální pro lidi s artritidou, slabýma rukama nebo nedostatkem flexibility. Naše kleštičky mají ručně broušené břity s tvarovanou špičkou, které umožňují přesné a čisté zastříhávání. Protože jsou vyrobeny z lékařské nerezové oceli, nemusíte se obávat, že budou rezivět nebo korodovat. Slibujeme: budou to vaše oblíbené nůžky na nehty, které budete používat po dlouhé roky.

OBSAH BALENÍ:

- 1 x nůžky na prsty na nohou se širokými čepelemi
- 1 x nůžky na prsty na rukou
- 1 x pilník na nehty
- 1 x nadzvedávač nehtů
- 1 x zatlačovač kutikuly
- 1 x úložný sáček

SPECIFIKACE PRODUKTU:

Tato sada na nehty byla vyrobena pro nejrůznější použití, obsahuje nůžky na nehty na nohou, kleštičky na zesílené nehty a může vám pomoci s houbovým ošetřením nehtů na nohou.

(Způsobené diabetem, tvrdnutím nehtů atd.)

Materiál: nerezová ocel + ABS

VAROVÁNÍ

- Tento produkt je velmi ostrý. Udržujte mimo dosah dětí.
- Před použitím vydezinfikujte.
Při použití dávejte pozor, abyste pokožku nevytáhali, měli byste ji přímo stříhat.
- Pokud máte zánět, otok nebo bolest, prosím nejdříve vydezinfikujte nehty na nohou a kleštičky na nehty (jódem nebo peroxidem vodíku) a poté je zastříhnete a znovu vydezinfikujte.
- **BUĎTE OPATRNÍ:** Nestříhejte nehty s vnitřní hranou nůžek směrem k vám, bude to bolestivé.
- Pružina rukojeti nůžek na nehty funguje správně pouze s jedinou pružinou. Nikdy nestlačujte obě strany pružin nahoru a nepoužívejte je současně.
- Pro uživatele, kteří mají vážně zarostlé nehty na nohou, je doporučeno profesionální ošetření. Nepravujte si nehty sami, pokud nejste pedikér.

POKYNY:

1. Vyčistěte špínu okolo nehtu a uchopte zarostlý nehet nadzvedávacem nehtů.
2. Pomocí nůžek na nehty odstříhnete přebytečné zbytky nehtů.
3. Špička kleštiček může zachytit zbytky nehtu, vhodné k léčbě paronychie a onychomykózy.

ZPŮSOB POUŽITÍ:

Namočte si nohy: Než si namočíte nohy, dejte do vody několik polévkových lžic soli nebo antibakteriální mýdlo. Nehet bude po namočení asi za 10 minut měkký, takže stříhání bude mnohem méně bolestivé.

Čištění: Po každém použití by se měl produkt očistit alkoholem, aby se zabránilo tvorbě bakterií.

Upozornění: U lidí, u kterých se vyvinula paronychie nebo nehet způsobil otoky a infekce, nezapomeňte si vyčistit nehty a kleštičky a ujistěte se, že jsou zbaveny bakterií.

TIPY:

- Před stříháním silných nehtů je nechte namočené v teplé vodě po dobu 5 minut, aby nehty změkly.
- Při stříhání nehtů nůžkami na zarůstající nehty na nohou musí být tlačena pouze jedna z pružin na rukojeti. (Druhá je náhradní).
- Otevřete čepel nůžek na nehty směrem dolů, aby odpovídala zakřivení nehtu, a abyste si mohli nehty hladce zastříhnout.
- Čepel je velmi ostrá. Pokud nůžky na nehty nepoužíváte, nasadte na ně plastový bezpečnostní kryt.
- U pacientů se silnými zarůstajícími nehty se doporučuje profesionální ošetření.

Pokyny k recyklaci a likvidaci



Toto označení znamená, že produkt by neměl být v celé EU likvidován s domácím smíšeným odpadem. V zájmu prevence možného poškození životního prostředí nebo lidského zdraví nekontrolovanou likvidací odpadu recyklujte odpad zodpovědně, čímž se podpoří opětovné využití materiálu. Chcete-li vrátit použité zařízení, využijte možnosti

vrácení a sběr nebo kontaktujte prodejce, u kterého jste produkt zakoupili. Ten pak může produkt recyklovat způsobem šetrným k životnímu prostředí.



Prohlášení výrobce, že produkt splňuje požadavky příslušných směrnic ES.