

EARSIO

A zsebméretű elektromos fültisztító



HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Köszönjük, hogy termékünket választotta!

Az elektromos fültisztítóval a biztonságosan és hatékonyan szabadulhat meg a fülzsírtól!

A CSOMAG TARTALMA:



1 x elektromos fültisztító (fő egység)

2 x szívófej

1 x tisztítókefe

1 x tároló

Tulajdonságok:

Anyag: Műanyag, szilikon

Áramforrás: 1 db AAA elem (nem tartozék)

Méret: Kb. 11,5 X 5,5 x 3 cm

Gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt

FIGYELMEZTETÉSEK

- Használat közben ne legyen más a közelünkben, üljön le egy biztonságos helyre, ahol senki és semmi nem zavarhatja meg.
- Gyerekek esetén felnőtt használja a készüléket.
- A nedves fülzsír eltávolítása előtt ellenőrizze, hogy a szívó és a szűrő nincs-e eltömődve.
- Sérült dobhártyával nem használja a készüléket.
- Ha fáj a füle vagy más sérülés érte, csak orvossal történő egyeztetést követően használja.
- Kizárólag eredeti rendeltetésének megfelelően használja.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ:




Megjegyzés: Bekapcsolás után hallhatóvá válik a működése. Helyezze be a fülébe a szívófejét. A fültisztító finom rezgésekkel távolítja el a fülzsírt, és egyenesen a tárolóba szívja a fülben ragadt szennyeződések. Fülmasszázs fellazítja a letapadt zsírt.

Használat közben vízszintesen tartsa a tisztítót.

Óvatosan helyezze a szívófej részét a fülébe, mozgassa néhányszor ki- és befelé. A fülzsír így egyszerűen eltávolítható.

*A fülzsír a tisztító elülső részében gyűlik össze.
A fülzsír eltávolítása során ügyelni kell rá, hogy a megfelelő helyzetben tartsa a tisztítót.

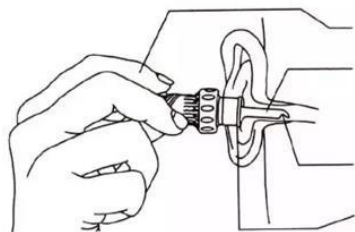

FIGYELEM: a fül sérülésének elkerülése érdekében kérjük, ne tolja a fülében túl mélyre.

- A szűrő és a szívófej levehető és vízzel elmosható.
- Egyes esetekben a szűrő eltávolítása nehézkes lehet.
- Ügyeljen rá, hogy csak a szűrő és a szívófej mosható el vízzel.



Újrahasznosítási és ártalmatlanítási utasítások



Ez a jelölés azt jelzi, hogy ezt a terméket az EU-ban nem szabad más háztartási hulladékkal együtt megsemmisíteni. A hulladék ellenőrizetlen ártalmatlanítása következtében a környezetre vagy az emberi egészségre gyakorolt esetleges káros hatások megelőzése érdekében; gondoskodjon a felelősségteljes újrahasznosításról az anyagi erőforrások fenntartható újrahasználatának támogatása érdekében. Az eszköz kidobásakor keresse fel az erre szolgáló gyűjtőhelyeket vagy vegye fel a kapcsolatot a kereskedővel, ahol a terméket vásárolta. Az eladó biztosíthatja a termék biztonságos újrahasznosítását.



A gyártó nyilatkozata arról, hogy a termék megfelel az alkalmazandó EK irányelvek követelményeinek.