

## EARSIO

Ferramenta elétrica de limpeza de ouvidos portátil



### MANUAL DO UTILIZADOR

Obrigado por adquirir o nosso produto.

Oferecemos-lhe uma forma segura e eficaz de limpar os seus ouvidos e eliminar a cera!

#### CONTEÚDO DA EMBALAGEM:



1 x ferramenta elétrica de limpeza de ouvidos (unidade principal)

2 x cabeças de sucção

1 x escova de limpeza

1 x caixa protetora

#### Especificações:

Material: plástico, silicone

Fonte de alimentação: 1 pilha AAA (não incluída)

Dimensões: aproximadamente 11,5 x 5,5 x 3 cm

Adequado a crianças e adultos


## AVISOS

- Durante a utilização, evite ser tocado por outras pessoas ou objetos e sente-se num local seguro.
- Quando utilizado com crianças, a limpeza deve ser realizada por um adulto.
- Para limpar cera húmida, verifique se o aspirador e o filtro estão bloqueados.
- Se tiver lesões no tímpano, não utilize o produto.
- Se tiver dores no ouvido ou outras lesões, utilize-o após consultar o seu médico.
- Utilize este aparelho apenas para a finalidade a que se destina.

## INSTRUÇÕES



**Nota:** ligue a ferramenta e, com a ferramenta ligada, insira-a no ouvido horizontalmente, com a cabeça de sucção alinhada ao ouvido. Para remover a cera dos ouvidos, a ferramenta irá vibrar suavemente para atrair a cera, aspirando rapidamente a sujidade no interior do ouvido para o reservatório de cera da ferramenta. Adicionalmente, massageie levemente o seu ouvido.

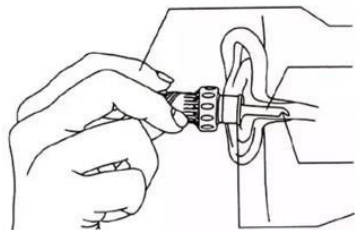

Durante a utilização, segure a ferramenta horizontalmente.

Insira ligeiramente o aspirador no ouvido, mova-o para a frente e para trás algumas vezes para remover facilmente a cera de ouvido.

\*A cera é absorvida pela parte frontal do aspirador.

Ao limpar a cera de ouvido, o aspirador deve ser inserido na orelha na posição certa.

**ATENÇÃO:** para garantir que não fere o ouvido, não insira o aspirador no ouvido demasiado profundamente.

## LIMPEZA A MANUTENÇÃO

- O filtro pode ser retirado e lavado com água, tal como o aspirador.
- Por vezes, o filtro é difícil de retirar.
- Note que as peças restantes do filtro e do aspirador não devem ser lavadas com água.



### Instruções de reciclagem e eliminação



Este símbolo indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos em toda a UE. Para evitar possíveis danos ao ambiente ou à saúde humana, resultantes da eliminação não controlada de resíduos, recicle-o de forma responsável para promover uma reutilização sustentável dos recursos materiais. Para devolver o seu dispositivo usado, utilize os sistemas de devolução e recolha disponíveis ou contacte o revendedor onde adquiriu o produto. Ele poderá recolher o produto e reciclá-lo de forma segura para o ambiente.



O fabricante declara que o produto cumpre os requisitos das diretivas CE aplicáveis.