

EARSIO

Aparat electric de buzunar pentru curățarea urechilor



MANUAL DE UTILIZARE

Vă mulțumim pentru că ați achiziționat produsul nostru.
Mod sigur și eficient de a curăța urechile și de a îndepărta ceara de urechi!

PACHETUL INCLUDE:



1 x Aparat electric pentru curățarea cerii de urechi (unitate principală)

2 x Capete de aspirare

1 x Perie de curățare

1 x Cutie de protecție

Specificații:

Material: Plastic, silicon

Sursa de alimentare: Alimentare cu baterii 1 baterie AAA (nu este inclusă)

Dimensiuni: Aproximativ 11,5 X 5,5 X 3 cm

Potrivit atât pentru copii, cât și pentru adulți


AVERTIZĂRI

- În timpul utilizării, vă rugăm să nu vă atingeți de alte persoane sau obiecte, așezați-vă într-un loc sigur.
- În timpul utilizării aparatului în urechile copiilor, acesta trebuie să fie operat de către o persoană majoră.
- În timpul curățării cerii umede de urechi, verificați dacă ventuza și filtrul sunt blocate.
- Nu utilizați aparatul în cazul în care timpanul este perforat.
- În cazul în care vă doare urechea, sau aceasta este vătămată, vă rugăm să utilizați aparatul doar după ce ați consultat un medic.
- Folosiți acest aparat numai în scopul pentru care a fost proiectat.

INDICAȚII:



Notă: Porniți aparatul, după ce ați auzit sunetul corespunzător rotirii motorului, introduceți aparatul încet în urechi, pe direcție orizontală, cu capul de aspirație aliniat cu urechea. Îndepărtarea cerii de urechi aparatul va vibra ușor pentru a atrage ceara, aspirând rapid murdăria din ureche în recipientul aparatului de depozitare a murdăriei. De asemenea, masați-vă bine urechea.

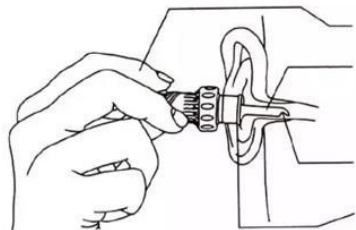

În timpul utilizării, țineți aparatul cu mâna în poziție orizontală.

Introduceți ușor capul de aspirație în partea din exterior a urechii, mișcați înăuntru și în afară de câteva ori, operație care va duce la îndepărtarea cu ușurință a cerii din ureche.

* Ceara din ureche este absorbită în partea din față a capului de aspirare.
În timpul curățării cerii, capul de aspirare trebuie introdus în ureche în poziția corectă.

ATENȚIE: pentru a vă asigura că nu există vătămări ale urechii, vă rugăm să nu introduceți aparatul prea adânc în ureche.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Filtrul poate fi detașat și spălat cu apă, la fel și capetele de aspirare.
- În unele cazuri, filtrul poate fi scos doar cu dificultate.
- Vă rugăm să rețineți că celelalte părți, cu excepția filtrului și a capului de aspirare, nu trebuie spălate cu apă.



Instrucțiuni referitoare la reciclare și eliminare



Acest marcaj indică faptul că pe întreg teritoriul UE acest produs nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri menajere. Pentru a preveni posibile daune aduse mediului înconjurător sau sănătății oamenilor prin eliminarea necontrolată a deșeurilor, reciclați produsul în mod responsabil pentru a promova reutilizarea durabilă a resurselor materiale. Pentru a returna produsul folosit, vă rugăm să utilizați sistemul de retur și colectare sau să contactați vânzătorul de la care a fost achiziționat produsul. Aceștia pot prelua produsul pentru reciclare în condiții de siguranță pentru mediul înconjurător.



Declarația producătorului conform căreia produsul respectă cerințele Directivelor CE aplicabile.