

EARSIO

Pripomoček za vakuumsko odstranjevanje ušesnega masla



UPORABNIŠKI PRIROČNIK

Zahvaljujemo se vam za nakup našega izdelka.

Varen in učinkovit način čiščenja ušes ter odstranjevanja ušesnega masla!

PAKET VKLJUČUJE:



1 x Pripomoček za vakuumsko odstranjevanje ušesnega masla

2 x Sesalni nastavek

1 x Krtačka za čiščenje

1 x Zaščitna škatla

Specifikacije:

Material: Plastika, silikon

Napajanje: 1 x AAA baterija (ni priložena)

Velikost: 11,5 X 5,5 X 3 cm

Primerno za otroke in odrasle

OPOZORILA


- Pri uporabi se vas ne smejo dotikati druge osebe ali predmeti, zato se usedite na varno mesto.
- Če napravo uporabljajo otroci, naj to poteka pod nadzorom odrasle osebe.
- Pri čiščenju mokrega ušesnega masla preverite, da se sesalna glava in filter ne zamašita.
- Če imate poškodovan bobnič, naprave ne uporabljajte.
- Če imate druge ušesne poškodbe in v ušesih čutite bolečino, se pred uporabo naprave posvetujte z zdravnikom.
- Napravo uporabljajte samo za njen namen.

NAVODILA:



Opomba: Napravo vklopite in, ko zaslišite zvok motorja, jo počasi in vodoravno vstavite v uho, tako da je sesalna glava poravnana z ušesom. Med uporabo boste začutili nežne vibracije, ki pomagajo pri izsesavanju umazanije in ušesnega masla iz ušes in vam učinkovito masirajo ušesa.

Napravo držite v vodoravnem položaju.

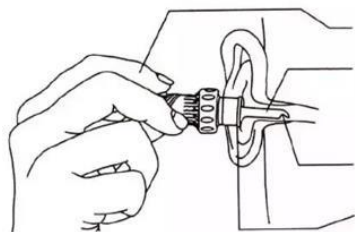

Konico nastavka nežno vstavite v uho, jo nekajkrat pomaknite naprej in nazaj in ušesno maslo bo enostavno odstranjeno.

*Ušesno maslo se nabira v konici nastavka.

Pri čiščenju ušesnega masla mora biti naprava pravilno nameščena v uho.

POZOR: nastavka ne potisnite pregloboko v uho, saj lahko utrpite poškodbe.

- Filter in nastavek lahko odstranite in ju sperete z vodo.
- V nekaterih primerih je težko odstraniti filter.
- Upoštevajte, da drugih delov, razen filtra in nastavka, ne smete spirati z vodo.



Navodila za recikliranje in odlaganje



Ta oznaka pomeni, da izdelka po vsej EU ni dovoljeno odvreči med ostale gospodinjske odpadke. Za preprečevanje morebitne škode za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov odgovorno reciklirajte in s tem spodbujajte trajnostno uporabo materialnih virov. Če želite vrniti rabljeno napravo, uporabite sistem za oddajo in zbiranje ali se obrnite na prodajalca, pri katerem ste kupili izdelek. Prodajalec lahko ta izdelek sprejme za okolju varno recikliranje.



Izjava proizvajalca, da izdelek ustreza zahtevam veljavnih direktiv EU.